

Показання до використання

- травми плечового пояса (у т. ч. вивихи, субкапітальні переломи плеча);
- запальні процеси в суглобах верхньої кінцівки;
- період реабілітації після операцій на плечовому поясі.

КОЛИ СТАНЕ У НАГОДІ

- Якщо у вас є травма або захворювання плеча, за яких необхідно дотримуватися певного положення у плечовому суглобі.
- Якщо у вас була операція, що вимагає у процесі реабілітації певного положення.

Склад

ППУ — 50%, поліестер — 40%, бавовна — 10%

Опис

Конструкція складається з підтримувальної подушки, яка забезпечує потрібний кут відведення, та двох ременів: через плече й на талію, що утримують саму подушку. У різних розмірах різні системи тримання руки. У першому та другому розмірах передпліччя вкладається у чохол, у третьому й четвертому кінцівка утримується на подушці двома манжетами: на зап'ястку й на плечі. Поверхні, що торкаються шкіри, бавовняні, тому під час застосування приладу в користувача не виникає неприємних відчуттів.

ПРИНЦИП ДІЇ

Шина фіксує кінцівку в положенні відведення під певним кутом. Підтримуючи руку, перебирає на себе частину її ваги й розвантажує таким чином м'язи та зв'язки. Скорочує період відновлення після травм плечового суглоба й операцій на цій ділянці.

1. Фіксує плече у фізіологічно вигідному положенні відведення (кут 15—90 градусів).
2. Полегшує відновлення функціональності суглоба у посттравматичному/післяопераційному періоді.
3. Знижує больові відчуття завдяки розвантаженню плечового суглоба та м'язів плечового пояса.

ОСОБЛИВОСТІ

- Якісна фурнітура
- Зносостійкі матеріали
- Не викликає подразнень

Загальна характеристика

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ

- Трикотажний чохол
- Триплексне полотно
- Поролон
- Застібки-липучки

Примітка: перед використанням необхідно ознайомитися з інструкцією із застосування та проконсультуватися з фахівцем щодо протипоказань.

Розмір	1	2	3	4
Кут відведення, °	15	25	45	90