

Склад

100 г розчину містять 100 нерозведеної гіпертонічної (23 г/л NaCl) стерильної морської води.

Показання

- промивання носової порожнини;
- зменшення набряку при застуді, риніті та синуситі;
- додаткове лікування патології лор-органів.

Протипоказання

- підвищена чутливість до компонентів виробу медичного призначення;
- вік до 3-х місяців.

Спосіб застосування та дози

Дорослим і дітям віком від 3-х місяців - по 1-3 впорскування в кожную ніздрю 2-3 рази на день.

Дітям до 2-х років промивання рекомендується проводити в положенні лежачи:

Нахилити голову дитини в сторону:

1. Ввести розпилювач у носовий хід, який знаходиться зверху.
2. Протягом 2-3 секунд натиснути на розпилювач, щоб промити ніс.
3. Посадити дитину, витерти рідина витікає, допомогти дитині очистити ніс.
4. Можна повторити процедуру (при необхідності).
5. Провести процедуру з іншим носовим ходом.

Дітям старше 2-х років і дорослим:

1. Нахилити голову в сторону.
2. Ввести розпилювач у носовий хід, який знаходиться зверху.
3. Протягом 2-3 секунд натиснути на розпилювач, щоб промити ніс.
4. Продути ніс, щоб очистити його від слизу.
5. Можна повторити процедуру (при необхідності).
6. Провести процедуру з іншим носовим ходом.

Процедуру найбільш ефективно проводити до їди.

Після використання розпилювач промити водою.

Не застосовувати препарат контейнер для кількох людей.

Зберігати балон і розпилювач в коробці.

Застосування в період вагітності або годування груддю - протипоказань немає.

Запобіжні заходи

У рідкісних випадках можуть виникати алергічні реакції.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно припинити застосування препарату і звернутися до Вашого лікаря.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Термін придатності

3 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С в місці, яке недоступне для дітей.

Упаковка

По 50 мл у флаконі, по 1 флакону в упаковці.

Виробник

Лабораторієз УРГО, Франція.