

## Склад

Натрію хлорид 5%, гіалуронат натрію 0,3%, Р-Plus™, калію хлорид, кальцію хлорид дигідрат, магнію хлорид гексагідрат та очищена вода.

## Опис

Наві NaCl 5% PF- це гіпертонічний офтальмологічний розчин, призначений для зменшення симптомів набряку рогівки. Розчин містить високу концентрацію хлориду натрію, який створює гіпертонічну слізну плівку, яка виводить зайву рідину з рогівки за допомогою осмотичного ефекту, а отже забезпечує тимчасове полегшення симптомів набряку.

Набряк рогівки виникає після операції на оці, травми, інфекції та запалення, а також є вторинним наслідком різних очних захворювань. Набряк рогівки може також виникати внаслідок надмірного зношування певних типів контактних лінз.

Поєднання Р-Plus™ та гіалуронату натрію допомагає підтримувати поверхню очей зволоженою та забезпечує тривале полегшення стану хворих і сухих очей.

Технологія OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser) дозволяє інноваційно доставляти стерильний офтальмологічний розчин без консервантів.


## Показання до використання

Наві NaCl 5% PF працює шляхом створення гіпертонічної слізної плівки, тим самим витягуючи воду з рогівки. Він застосовується для тимчасового полегшення у разі набряку рогівки.

## Протипоказання

Не застосовуйте у разі специфічної гіперчутливості до будь-якого з компонентів.

## Рекомендації щодо застосування

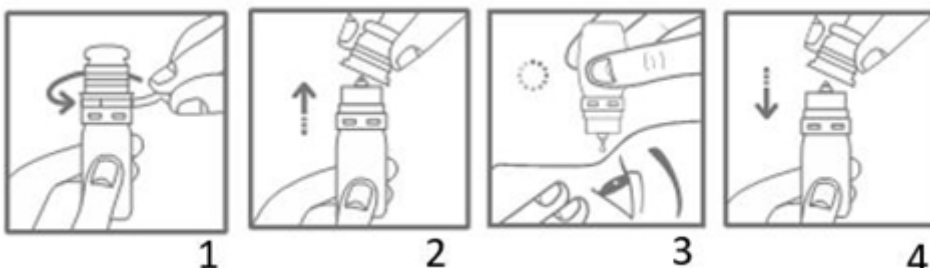

1. Перед першим використанням очних крапель, зніміть кільце контролю першого відкриття, потягнувши за нього.

2. Зніміть ковпачок.

3а. Перед першим використанням очних крапель, переверніть флакон догори дном і повільно стискайте флакон, поки кілька крапель не вилетиться на тканину.

3б. Для того, щоб закапати краплі в око (очі), відкиньте голову назад, переверніть флакон догори дном, відтягніть нижню повіку і повільно стискайте пляшку, поки крапля не потрапить в око (очі). Відпустіть повіку і закрийте очі на 1-2 хвилини для запобігання витіканню розчину.

Закапуйте 1 або 2 краплі у мішечок ураженого ока (очей) і повторюйте ці дії 3 рази на день або за вказівкою офтальмолога.

4. Після використання закрийте флакон очних крапель ковпачком.

5. - Зачекайте 10-15 хвилин, перш ніж використовувати будь-який інший офтальмологічний продукт, або дотримуйтеся вказівок лікаря.

### **Застереження**

- Використовуйте лише за призначенням та під наглядом лікаря-офтальмолога.
- Використання цього продукту може спричинити тимчасове печіння та подразнення очей. Якщо проблема не зникне, проконсультуйтеся з лікарем.
- Для запобігання можливому забрудненню, не допускайте контакту кінчика крапельниці з будь-якою поверхнею або оком.
- Не ковтайте розчин.
- Зберігайте в недоступному для дітей місці.
- Не використовуйте після закінчення терміну придатності.
- Після відкриття пляшки розчин необхідно використати протягом 90 днів.
- Не використовуйте, якщо пляшка пошкоджена.
- Не піддавайте дії прямих сонячних променів.
- У разі післяопераційного набряку, застосовуйте лише за призначенням лікаря.

### **Умови зберігання**

Зберігати при температурі від 5 до 35 ° С та захищати від сонячного світла.

### **Виробник**

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН» 03127, Україна, м Київ, проспект  
Голосіївський, 132

НОВАКС®ФАРМА Коронадо Проспект Фонв'єй 20 МС 98000 МОНАКО