

Опис

Використовується в дихальному контурі з боку апарату ШВЛ, або з боку пацієнта для захисту пацієнта, системи апарату від бактерій, вірусів і мікроорганізмів, що містяться в повітрі, який подається через дихальний контур до пацієнта. **Для дорослих.**

Загальна характеристика

- Механізм фільтрації - електростатичного типу;
- Ефективність фільтрації бактерій: 99,99% (для частинок > 0,3µm);
- Опір потоку 100Па при швидкості потоку 30 л / хв .;
- Форма корпусу фільтра - кругла з прозорого полімерного матеріалу;
- CO2 порт з роз'ємом Луер лок (Luer Lock) із закритою кришечкою;
- Герметичність < 0,01 при внутрішньому тиску 0,21 кг/см²;
- Гідрофобна мембрана;
- Дихальний об'єм 90-1500 мл;
- Мертвий простір 32 мл;
- Фільтраційний матеріал, водовідштовхувальний фільтраційний матеріал;
- Максимальна тривалість використання - 24 години;
- Стерильний, апірогенний, нетоксичний;
- Для одноразового використання;
- Індивідуальна упаковка;
- Термін придатності 5 років від дати виготовлення, вказаної на упаковці.

Розмір:

- Для дорослих;
- Діаметр фільтра - 6 см;
- Довжина - 8 см;
- Об'єм 50 мл;
- Вага 23 гр.

Рекомендації щодо застосування

1. Відкрити упаковку.
2. Належним чином приєднати виріб до апарату штучної вентиляції легень.
3. Після інсталяції перевірити відсутність витоку газу.
4. Виріб можна застосовувати тільки за умови відсутності витоку газу.
5. Після використання утилізувати згідно з установленими нормами.