

Склад

Натрію хлорид, вода очищена, продукти окислення жирних кислот (суміш карбонільних сполук).

Опис

Прозора рідина від світло-жовтого до жовтого з коричнюватим відтінком кольору зі специфічним запахом. В процесі зберігання допускається поява осаду.

Властивості

ЛОРЕКТ спрей являє собою ефективний антисептичний та антимікробний засіб природного походження, отриманий шляхом окислення жирних кислот за допомогою ізотонічного розчину натрію хлориду. Джерелом жирних кислот є риб'ячий жир, який містить в своєму складі високий рівень мононенасичених і поліненасичених жирних кислот, а також вітаміни D3, А, Е. В ході процесу окислення жирних кислот утворюються карбонільні сполуки, що мають антимікробну активність відносно гноерідної (піогенної) мікрофлори – синьогнійної палички, протей, кишкової палички, стафілококів. Така активність пов'язана з особливістю будови карбонільних сполук, що визначає їх здатність до інактивації багатьох ферментів мікробної клітини, що призводить до пригнічення життєво важливих метаболічних процесів в ній. В результаті процесу окислення жирних кислот природним шляхом без додавання хімічних реагентів і оксидантів отримано ЛОРЕКТ спрей, який є єдиним, що містить суму карбонільних сполук, достатню для прояву необхідної антимікробної та антисептичної активності. Наявність карбонільних сполук у присутності ізотонічного розчину натрію хлориду сприяє знищенню мікробів на слизовій оболонці носової та ротової порожнин, не порушуючи її нормальну мікрофлору; видаленню вірусів, бактерій і алергенів; зволоженню і очищенню слизової носа, видаляючи надлишковий слиз, скоринки і найдрібніші частинки після операцій без ризику кровотечі. В результаті покращується функція миготливого епітелію, підсилюється опірність слизової оболонки ротової порожнини, порожнини носа і придаткових пазух до проникнення хвороботворних бактерій і вірусів, нормалізуються реологічні властивості слизу. ЛОРЕКТ спрей допомагає відновити прохідність і нормальне функціонування верхніх дихальних шляхів, прискорює одужання при захворюваннях носоглотки і придаткових пазух носа. Виріб не чинить фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії.

Показання до використання

- для полегшення стану при гострих і хронічних запальних захворюваннях носоглотки, додаткових пазух носа, ротової порожнини різної етіології (риніти, синусити, тонзиліти (у тому числі ангіни), ларингіти, фарингіти, стоматити);
- у складі комплексного лікування і для профілактики гострих респіраторних захворювань;
- для санації слизової оболонки носа;
- для зменшення проявів місцевого запального процесу в носовій і ротовій порожнинах;
- для зволоження слизової оболонки носа та збереження її захисних фізіологічних властивостей в умовах підвищеної сухості повітря;
- у осіб, що страждають на часті риніти і синусити, регулярне використання виробу дозволяє скоротити частоту та термін застосування лікарських засобів;
- у складі комплексного лікування гіпертрофії аденоїдів, аденоїдиту.

Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів медичного виробу.

Спосіб застосування та дози

Перед початком застосування слід порадитися з лікарем.

При застосуванні у носовій порожнині:

Перед введенням ЛОРЕКТ спрею рекомендується звільнити носові ходи від слизу. При комплектації спрею-насосом та назальною насадкою-розпилювачем: надіти на спрею-насос назальну насадку-розпилювач із захисним ковпачком. Зняти з насадки-розпилювача захисний ковпачок. При комплектації спрею-насосом з універсальною насадкою-розпилювачем: повернути насадкурузпилювач отвором вгору. Після застосування насадку повернути у вихідне положення: отвором вниз. Зробити пробне зрошення з метою визначення чутливості до виробу: тримаючи флакон вертикально, ввести насадкурузпилювач в один з носових ходів та здійснити 1 натискання. ЛОРЕКТ спрею можна застосовувати у разі відсутності через 30 хвилин після застосування набряку слизової оболонки носу, утруднення дихання, слезотечі, чхання, свербіж.

Дорослим: здійснювати 3-4 натискання на насадкурузпилювач у кожний носовий хід 3-4 рази на день.

Дітям: 1 натискання в кожний носовий хід 3-4 рази на день.

При застосуванні у ротовій порожнині:

При комплектації спреї-насосом та оральною насадкою-розпилювачем: надіти на спреї-насос оральну насадку-розпилювач. При комплектації спреї-насосом з універсальною насадкою-розпилювачем: повернути насадку-розпилювач отвором вбік. Після використання насадку повернути у вихідне положення: отвором вниз. Зробити пробне зрошення з метою визначення чутливості до виробу: тримаючи флакон вертикально, ввести насадку-розпилювач у ротову порожнину та здійснити 1 натискання. ЛОРЕКТ спреї можна застосовувати у разі відсутності через 30 хвилин після застосування набряку слизової оболонки, свербіжжю, утруднення дихання, слезотечі.

Дорослим: здійснювати 3-4 натискання на насадку-розпилювач 3-4 рази на день.

Дітям: 1-2 натискання 3-4 рази на день.

Особливості щодо застосування

При зрошенні носової порожнини не закидати голову. З метою уникнення поширення інфекції не рекомендується користуватися однією й тією ж насадкою кількома особам. Одразу після застосування, а також у разі використання однієї і тієї ж насадки в носовій та ротовій порожнинах її слід обробити ватним тампоном, змоченим у 70^о розчині етилового спирту або іншого антисептика. Під час розпилювання медичного виробу слід уникати його потрапляння в очі.

Застосування у дітей: не застосовувати дітям віком до 1 року

Побічна дія

Можлива індивідуальна непереносимість, алергічні реакції.

Умови зберігання

У захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Транспортувати всіма видами критого транспорту при температурі не вище 25 °С.

Термін придатності

2 роки. Необхідно використати до дати, зазначеної на упаковці.

Форма випуску

Спрей. По 30 мл (ml) виробу у флакони зі спреї-насосом та насадкою-розпилювачем (допускається комплектація розпилювальними пристроями різної конструкції: назальною насадкою-розпилювачем і захисним ковпачком та оральною насадкою-розпилювачем; універсальною насадкою-розпилювачем та ін.). Виробник залишає за собою право змінювати комплектність упаковки, що не впливає на споживчі властивості виробу.

Виробник

ТОВ «БІОЛІК ФАРМА»

Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 61070, Харківська обл., місто Харків, Помірки, будинок 70.

Адреса місця провадження діяльності: Україна, 61070, Харківська обл., місто Харків, Помірки-70, будинок б/н.