

Опис

Забезпечує миттєву знеболюючу дію та особливий захист вальгусної деформації мізинця стопи.

Склад

Полімерний гель з медичними маслами для додаткового зволоження шкіри

- 1 шт. в уп.
- Розмір універсальний (еластичний)

Спосіб застосування

1. Промийте та висушіть ділянку шкіри, де буде використовуватись виріб.
2. Надягніть виріб на мізинець стопи, розмістивши гелеву подушечку на вальгусну «кісточку».
3. Після зняття промийте виріб теплою водою та висушіть природнім шляхом (без використання нагрівальних приладів та уникаючи потрапляння прямих сонячних променів).
4. Після висихання, виріб готовий до повторного використання.

Показання

1. Подагра
2. Бурсит суглобів п'ятого пальця
3. Початкова і середня ступінь вальгусної деформації мізинця
4. Для зменшення болі в суглобі мізинця і амортизації бічних ударів
5. Полегшує ходьбу, захищаючи наявні мозолі (в тому числі сухі) або затвердіння.

Застереження

Не рекомендується використовувати більше 16 годин на день.

Тільки для зовнішнього місцевого використання.

Не допускати контакту з відкритими ранами.

Людам з діабетом та проблемами кровообігу перед використанням виробу слід проконсультуватися з лікарем.

Зберігати у недоступному для дітей місці.