

## **Опис**

Забезпечує миттєву знеболюючу дію та особливий захист вальгусної деформації («кісточки») великого пальця стопи.

## **Склад**

Полімерний гель з медичними маслами для додаткового зволоження шкіри

- 1 шт. в уп.
- Розмір універсальний (еластичний)

## **Спосіб застосування**

1. Промийте та висушіть ділянку шкіри, де буде використовуватись виріб.
2. Надягніть захисний чохол на великий палець стопи, розмістивши гелеву подушечку на вальгусну «кісточку».
3. Після зняття промийте виріб теплою водою та висушіть природнім шляхом (без використання нагріваючих приладів та уникаючи потрапляння прямих сонячних променів).
4. Після висихання чохол готовий до повторного використання.

## **Показання**

- Подагра
- Корекція вальгусної деформації великого пальця стопи
- Для зменшення відчуття дискомфорту і втоми під час ходьби
- Для зменшення тиску та захисту від тертя великого пальця стопи

## **Застереження**

Не рекомендується використовувати більше 16 годин на день.

Тільки для зовнішнього місцевого використання.

Не допускати контакту з відкритими ранами.

Людам з діабетом та проблемами кровообігу перед використанням виробу слід проконсультуватися з лікарем.

Зберігати у недоступному для дітей місці.