

Опис

Для захисту пальців ніг від тертя та утворення мозолів із молоткоподібною деформацією, врослими нігтями та мозолями

Склад

Полімерний гель з медичними маслами для додаткового зволоження шкіри.

2 шт. в уп.

Розмір L Ø25 мм, довжина 55 мм

Спосіб застосування

1. Промийте та висушіть ділянку шкіри, де буде використовуватись виріб.
2. За необхідності, відріжте за допомогою ножиць зайву довжину від напальчника, в залежності від розміру вашого пальця, на який буде надягатися виріб.
3. Надягніть напальчник на палець ноги.
4. Після зняття промийте напальчник теплою водою та висушіть природнім шляхом (уникаючи потрапляння прямих сонячних променів).
5. Після висихання, виріб готовий до повторного використання.

Показання

- Для захисту мозолів, затвердінь, врослих нігтів, кутикули, молоткоподібних пальців.
- Зменшення тиску та тертя на пошкоджений палець
- Для зволоження та заживлення старих мозолів і затвердінь

Застереження

Не рекомендується використовувати більше 16 годин на день.

Тільки для зовнішнього місцевого використання.

Не допускати контакту з відкритими ранами.

Людам з діабетом та проблемами кровообігу перед використанням виробу слід проконсультуватися з лікарем.

Зберігати у недоступному для дітей місці.