

## **Опис**

Еластичний тканинний протектор з гель-полімерною подушкою всередині для захисту вальгусної «кісточки» великого пальця стопи.

## **Склад**

Полімерний гель з медичними маслами для додаткового зволоження шкіри

Тканинна основа: поліамід 86% , еластан Lycra 14%

1 шт. в уп.

Розмір універсальний (еластичний)

## **Спосіб застосування**

1. Промийте та висушіть ділянку шкіри, де буде використовуватись виріб.
2. Надягніть захисний чохол на великий палець стопи, розмістивши гелеву подушечку на вальгусну «кісточку».
3. Після зняття промийте виріб теплою водою та висушіть природнім шляхом (без використання нагріваючих приладів та уникаючи потрапляння прямих сонячних променів).
4. Після висихання виріб готовий до повторного використання.

## **Показання**

- Для зменшення тиску та захисту від тертя великого пальця стопи
- Сприяє вирівнюванню позиції пальця та забезпечує підтримку
- Рівномірно розподіляє навантаження на стопі, зменшує тиск на вальгусний вигін та запобігає натиранням мозолів

- Попереджає подальше прогресування деформації

### **Застереження**

Не рекомендується використовувати більше 16 годин на день.

Тільки для зовнішнього місцевого використання.

Не допускати контакту з відкритими ранами.

Людам з діабетом та проблемами кровообігу, перед використанням виробу слід проконсультуватися з лікарем.

Зберігати у недоступному для дітей місці.