

## **Опис**

Призначений для забезпечення знеболюючої дії та амортизації в зоні п'ятки, зниження ударного навантаження на стопу, суглоби та хребет

## **Склад**

Основа з 100% медичного силікону з вставкою синього кольору із 100% медичного силікону підвищеної м'якості

## **Спосіб застосування**

1. Розмістіть виріб у взутті, під зону п'ятки.
2. Використовуйте одночасно підп'яточник для обох ніг, щоб уникнути порушення рівноваги.
3. Після зняття взуття промийте виріб теплою водою або протріть вологою ганчіркою та висухіть природнім шляхом (без використання нагріваючих приладів, уникаючи потрапляння прямих сонячних променів).
4. Після висихання виріб готовий до повторного використання. За необхідності можна присипати тальком

## **Показання**

- Для зменшення ударного навантаження на хребет, суглоби, що робить його рекомендованим для жінок у період вагітності
- Реабілітаційний період після травми кістки п'яти
- Для втомлених ніг та у випадках, коли доводиться проводити багато часу стоячи
- П'яткова шпора
- Мозолі, тріщини, травми та сухість п'яти
- Для зменшення навантаження на п'яту під час заняття спортом

## **Застереження**

Не рекомендується використовувати більше 16 годин на день.

Тільки для зовнішнього місцевого використання.

Не допускати контакту з відкритими ранами.

Людам з діабетом та проблемами кровообігу перед використанням виробу слід проконсультуватися з лікарем.

Зберігати у недоступному для дітей місці.