

Опис

Призначений для розділення 1-го та 2-го пальців ніг та утримання їх в правильному положенні. Профілактика розвинення бурситу.

Склад

Полімерний гель з медичними маслами для додаткового зволоження шкіри

2 шт. в упаковці.

Спосіб застосування

1. Промийте та висушіть ділянку шкіри, де буде використовуватись виріб.
2. Надягніть розділювач між 1-м та 2-м пальцями стопи.
3. Після зняття промийте виріб теплою водою та висушіть природнім шляхом (без використання нагрівальних приладів та уникаючи потрапляння прямих сонячних променів).
4. Після висихання розділювач готовий до повторного використання.

Показання

- Для утримання пальців в правильному положенні
- Лікування та профілактика бурситу
- При молотовидних пальцях
- Корекція позиції пальців після травми або операції
- Мозолі між пальцями

Застереження

Не рекомендується використовувати більше 16 годин на день.

Тільки для зовнішнього місцевого використання.

Не допускати контакту з відкритими ранами.

Людам з діабетом та проблемами кровообігу перед використанням виробу слід проконсультуватися з лікарем.

Зберігати у недоступному для дітей місці.