

## **Опис**

Призначений для забезпечення знеболюючої та амортизуючої дії в передній частині стопи

## **Склад**

Полімерний гель з медичними маслами для додаткового зволоження шкіри

Клейовий шар

1 пара в упаковці.

Розмір універсальний

## **Спосіб застосування**

1. Промийте та висушіть ділянку шкіри, де буде використовуватись виріб.
2. Розмістіть подушку клейкою частиною до внутрішньої частини взуття, під передню частину стопи. Притисніть до взуття для надійного кріплення.
3. Після зняття промийте виріб теплою водою та висушіть природнім шляхом (без використання нагрівальних приладів та уникаючи потрапляння прямих сонячних променів).
4. Після висихання виріб готовий до повторного використання.

## **Показання**

- Розвантаження та амортизація переднього відділу стопи
- Зняття втоми та полегшення при ходьбі у взутті на підборах

- Для зменшення відчуття втоми в передньому відділі стопи при поперечному плоскостопості

### **Застереження**

Не рекомендується використовувати більше 16 годин на день.

Тільки для зовнішнього місцевого використання.

Не допускати контакту з відкритими ранами.

Людам з діабетом та проблемами кровообігу, перед використанням виробу слід проконсультуватися з лікарем.

Зберігати у недоступному для дітей місці.