

## **Опис**

Тонка прозора гелева подушка на клейовій основі, що забезпечує знеболюючу та амортизуючу дію у ділянці п'яти, запобігаючи утворення мозолів

## **Склад**

Полімерний гель з медичними маслами

2шт. в упаковці.

Розмір універсальний

## **Спосіб застосування**

1. Промийте та висушіть ділянку шкіри, де буде використовуватись виріб.
2. Розмістіть накладку клейкою частиною до внутрішньої частини взуття, під верхню частину п'ятки. Притисніть до взуття для надійного кріплення
3. Протирайте виріб теплою водою за необхідності.

## **Показання**

- Забезпечує захист вразливим ділянкам, запобігаючи тертю та подразненню шкіри
- Забезпечує додатковий комфорт під час ходьби в новому взутті
- Для зволоження та заживлення мозолів та саден

## **Застереження**

Не рекомендується використовувати більше 16 годин на день.

Тільки для зовнішнього місцевого використання.

Не допускати контакту з відкритими ранами.

Людам з діабетом та проблемами кровообігу, перед використанням виробу слід проконсультуватися з лікарем.

Зберігати у недоступному для дітей місці.