

## **Склад**

ТІАВ (мікрокристали титану діоксиду з ковалентно пов'язаними іонами срібла); натрію гіалуронат, екстракт алое барбаденського; каприловий/каприновий тригліцерид; стеарат ПЕГ-6 (та) гліколю стеарат (та) стеарат ПЕГ-32, гліцерил стеарат.

## **Опис**

Медичний виріб ВагіТіаб випускається у формі швидкорозчинних м'яких желатинових капсул, які містять кілька компонентів, завдяки властивостям речовин яких ВагіТіаб створює ефект захисного бар'єру у якості допоміжного медичного виробу при лікуванні бактеріальних та вірусних інфекцій, таких як вульвовагініт, генітальний герпес та кондиломи, а також післяпологових пошкоджень.

ВагіТіаб утворює захисний бар'єр у зоні ураження з метою ізолювання та захисту тканин від зовнішніх подразників та сприяє процесу нормального фізіологічного рубцювання та процесу загоєння.

ВагіТіаб забезпечує подвійну дію:

- ізолює область застосування від зовнішніх агресивних впливів мікробів;
- обмежує мікробну колонізацію в області застосування, створюючи ідеальні умови для відновлення природних фізіологічних функцій тканин.

## **Показання**

Допоміжний медичний виріб ВагіТіаб застосовують під час:

- лікування бактеріальних, грибкових та вірусних інфекцій, таких як кандидоз та кондиломи;
- лікування післяпологових пошкоджень;

- у профілактиці рецидивів генітального герпесу 2 (ВПГ-2).

Медичний виріб ВагіТіаб не є ні сперміцидом, ні контрацептивом.

### **Спосіб застосування**

1. Перед застосуванням ретельно очистити область статевих органів.
2. Ввести капсулу ВагіТіаб глибоко в піхву.
3. Повторювати застосування один раз на день протягом семи днів.

Медичний виріб ВагіТіаб слід застосовувати при появі перших симптомів (свербіж, печіння, неприємні відчуття тощо). Після місцевої терапії період призупинення застосування виробу не вимагається.

### **Застереження**

- Застосовувати медичний виріб тільки при неушкодженій епітеліальній тканині.
- Не застосовувати виріб для цілей, крім тих, що вказані в інструкції до застосування.
- Перед застосуванням ретельно вимити руки.
- Не застосовувати виріб після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
- Зберігати при кімнатній температурі та тримати подалі від джерел тепла.
- Не заморожувати.
- Тримати в недоступному для дітей місці.
- Тільки для місцевого застосування – не ковтати.
- Не застосовувати, якщо упаковка відкрита або пошкоджена.
- Не застосовувати у разі відомої чутливості до будь-якого з компонентів.
- Припинити лікування у разі аномальних шкірних реакцій.
- У разі тривалого застосування проконсультуватися з лікарем.
- Виріб не є ні сперміцидом, ні контрацептивом.

## **Протипоказання**

Випадків передозування не спостерігалось. Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів. Взаємодія з лікарськими засобами та речовинами не спостерігалася.

## **Умови зберігання**

Зберігати при температурі 9-25 °С в недоступному для дітей місці. Тримати подалі від джерел підвищеної вологості та тепла. Під впливом прямих сонячних променів виріб може набутися легкого жовтуватого кольору, що не впливає на його функціональні особливості та термін придатності.

## **Упаковка**

по 10 капсул у блістері, по 1 блістеру у картонній коробці.

## **Виробник**

ВИРОБНИК:

ЕнТіСі С.р.л., Віа Луїджі Ратца, 3, 20124 Мілан (МІ), Італія. (NTC S.r.l., Via Luigi Razza, 3, 20124 Milano (MI), Italy.)

УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ:

ТОВ Конарк Інтелмед, вул. Шевченка, 315, м. Харків, 61033, Україна, тел. +38 057 714-38-01, +38 057 714-38 02.

Уповноважений представник в Україні здійснює функції щодо прийняття претензій від споживачів.