

## **Опис**

Універсальні набори пластирів з подушечкою на полімерній основі широкого спектру використання. Форма випуску стріп.

## **Показання**

Призначений для фіксації пошкоджених пальців, при наданні першої допомоги в разі дрібних ран, подряпин, порізів.

## **Спосіб застосування**

Перед використанням вийняти пластир з паперового пакету та зняти захисну плівку, після чого подушечкою прикласти до рани, а краї пластиру притиснути до шкіри. Пластир може залишатись на шкірі протягом доби.

## **Протипоказання**

Гіперчутливість до основи пластиру, клеючої речовини.

## **Побічні ефекти**

Подразнення шкіри у місці приклеювання.

## **Застереження**

Пластир не можна використовувати на відкритих післяопераційних ранах. В разі появи сильного подразнення пластир необхідно зняти.

## **Умови зберігання**

Зберігати при температурі від 5°C до 35°C.

## **Виробник**

ТОВ «КАЛИНА МЕДИЧНА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ», 04128, м. Київ, вул. Садова, 16/19, Україна,