

Опис

Швидкий тест для діагностики вірусу гепатиту С Express Test, це тест-касета для якісного виявлення наявності антитіл гепатиту С (HCV) у зразках цільної крові, сироватки або плазми.

Вірус гепатиту С — це невеликий одноланцюговий РНК-вірус із позитивною оболонкою. Антитіла до HCV виявляються у понад 80% пацієнтів.

Тест використовує комбінацію рекомбінантного антигену для вибіркового виявлення підвищених рівнів антитіл до вірусу гепатиту С. Коли достатній об'єм досліджуваного зразка подається в лунку для зразків касети, зразок капілярно мігрує по мембрані до тестових зон, яка покрита антитілами HCV, на які під час тестування по зразку крові, реагує поверхневий антиген гепатиту С.

Тест має високу чутливість 98,1%, що дає змогу визначити наявність вірусу з точністю результату - 98,9%.

Комплектація

Комплектація складається з:

1. Саше-пакет, що містить: тест-касета - 1 шт, піпетка - 1 шт, осушувач (десикант) - 1 шт
2. Буфер - 1 шт
3. Рукавички медичні нестерильні оглядові - 1 пара
4. Стерильний одноразовий ланцет 1 шт
5. Інструкція із застосування - 1 шт
6. Серветки спиртові - 2 шт.

Спосіб застосування

1. Вийміть тест-касету з герметичної упаковки та використайте її якомога швидше.
2. Додайте в лунку зразків (S) 2 краплі цільної крові з пальця чи вени, потім 1 краплю буферу та зачекайте результат.
3. Результат оцінювання тесту через 15 хвилин, але не пізніше вказаного часу.

Оцінка результатів:

- **ПОЗИТИВНИЙ:** з'являються 2 чіткі червоні лінії. Одна повинна бути в контрольній зоні (C), а інша лінія повинна бути в тестовій зоні (T).
- **НЕГАТИВНИЙ:** одна червона лінія з'являється в контрольній зоні (C). У тестовій зоні (T) не з'являється видима червона або рожева лінія.
- **НЕДІЙСНИЙ:** контрольна лінія не відображається. Перегляньте інструкцію та повторіть тест із новою тестовою касетою.

Термін придатності

24 місяці.

Умови зберігання

Зберігати при температурі від +2 °C до +30 °C.