

## Склад

1 ml (мл) розчину містить:

- Ксилітол - 120 mg/ml (мг/мл)
- Натрію хлорид - 9 mg/ml (мг/мл)
- Вода для ін'єкцій - до 1 ml (мл)

## Форма випуску

Розчин у контейнерах полімерних по 2 ml (мл), №10.

Інструкція із застосування медичного виробу.

## Опис

**SNOTTY® (CHOTTI®)** – розчин, що очищує носові ходи і пазухи, усуваючи забруднюючі і подразнюючі речовини. **SNOTTY® (CHOTTI®)** швидко усуває закладеність носа при респіраторних інфекціях верхніх дихальних шляхів та алергіях.

Ксилітол є основним компонентом медичного виробу. В умовах зниження рН він стабілізує білкові структури клітин. Завдяки осмолітичним властивостям регулює сольовий обмін на поверхні слизової оболонки носа та носоглотки. Висока концентрація ксилітолу (12 %) ускладнює адгезію (прилипання) мікроорганізмів до клітин слизової оболонки, перешкоджає утворенню біоплівки, чинить антимікробний вплив на деякі види патогенів.

Ксилітол розріджує і полегшує виведення слизу, утримує вологу, завдяки чому зволожує та заспокоює подразнену слизову оболонку носа, полегшує дихання та покращує якість сну у пацієнтів із гострим та хронічним перебігом інфекційних та алергічних захворювань порожнини носа, додаткових пазух і носоглотки. Наявність ксилітолу обумовлює солодкий смак.

Концентрація компонентів медичного виробу обумовлює гіперосмолярність розчину, завдяки чому він допомагає виводити надлишок вологи та усувати набряк слизової оболонки носових ходів та пазух.

Складові медичного виробу не вступають в реакції з організмом людини та є інертними щодо нього, не чинять фармакологічної, імунологічної та метаболічної дії та не викликають звикання.

Не містить консервантів.

Стерильно.

## **Цільове призначення**

**SNOTTY® (СНОТТИ®)** – розчин для інтраназального введення, що усуває набряк слизової оболонки носових ходів та пазух, полегшує дихання шляхом очищення, розрідження та покращення виведення секрету.

## **Цільова група**

Діти, в тому числі немовлята, та дорослі.

## **Показання до використання**

Як додатковий засіб при інфекційних та алергічних захворюваннях порожнини носа, придаткових пазух і носоглотки.

Як засіб, що сприяє видаленню назального секрету та усуненню закладеності носа при утрудненому носовому диханні.

Для щоденної гігієни порожнини носа.

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до будь-якого компоненту медичного виробу.

## **Побічні ефекти**

Реакції підвищеної чутливості, печіння слизової оболонки порожнини носа.

У разі виникнення будь-яких побічних реакцій слід негайно припинити використання медичного виробу та повідомити лікаря і виробника.

## **Застереження**

- Використовуйте **SNOTTY® (СНОТТИ®)** відповідно до інструкції із застосування. Не використовуйте іншими способами, ніж викладені в цій інструкції із застосування медичного виробу. Проконсультуйтеся з лікарем перед застосуванням, якщо у Вас є питання.
- Не використовуйте один і той же полімерний контейнер для декількох пацієнтів. Використання одного полімерного контейнеру більш ніж однією людиною може викликати поширення інфекції.
- Виріб призначений тільки для одноразового застосування. Повторне використання може призвести до інфікування. Не використовуйте повторно.

- Забороняється піддавати повторній стерилізації.
- Не використовуйте одночасно з іншими засобами для інтраназального введення. При необхідності інтраназального застосування іншого медичного виробу або лікарського засобу слід зробити проміжок між їх використанням не менше 15 хвилин.
- Не нагрівайте контейнер з розчином. При зберіганні в холодильнику перед застосуванням при необхідності слід витримати виріб протягом 15–30 хвилин при кімнатній температурі.
- Не змішуйте з будь-якими розчинами, лікарськими засобами, тощо.
- Відсутні доступні клінічні дані щодо ефективності та переносимості медичного виробу у період вагітності та годування груддю. Цій категорії пацієнтів слід проконсультуватися з лікарем перед застосуванням медичного виробу.
- Перед використанням медичного виробу перевірте цілісність упаковки і термін придатності. Не використовуйте виріб при пошкодженні первинної упаковки або якщо закінчився термін придатності.
- Утилізувати відповідно до місцевих вимог з утилізації відходів.

### **Спосіб застосування та дози**

Використовувати 2–4 рази на добу. За необхідності кратність прийому може бути збільшена. Тривалість використання визначають індивідуально.

Використання дітьми повинно проходити під наглядом або за допомогою дорослих.

#### *Спосіб застосування для дорослих:*

1. перед початком процедури слід вимити руки з милом та обережно звільнити носові ходи від секрету швидким різким видихом через ніс, блокуючи при цьому один носовий хід пальцем;
2. відкрити полімерний контейнер і закапати по 2–4 краплі розчину у кожен носовий хід (дихати при цьому слід через рот або затримати дихання на вдиху), при закапуванні у правий носовий хід голова має бути закинута трохи назад та нахилена ліворуч і, навпаки, голова має бути нахилена праворуч при введенні розчину у лівий носовий хід;
3. після закапування розчину бажано побути в положенні лежачи із закинutoю назад головою протягом 2 хвилин, після чого звільнити носові ходи від розрідженого секрету.

#### *Спосіб застосування для дітей:*

1. перед початком процедури слід вимити руки з милом, обережно звільнити носові ходи дитини від секрету та покласти її на спину;
2. відкрити полімерний контейнер і закапати по 2–4 краплі розчину у кожен носовий хід (при цьому слід запропонувати дитині дихати через рот або затримати дихання на вдиху), при закапуванні у правий носовий хід голова дитини має бути закинута трохи назад та нахилена ліворуч і, навпаки, голова дитини має бути нахилена праворуч при введенні розчину у лівий носовий хід;
3. після закапування розчину дитині бажано побути в положенні лежачи із закинutoю назад головою протягом 2 хвилин, після чого слід посадити дитину, щоб вона тримала голову прямо, та допомогти їй звільнити носові ходи від розрідженого секрету.

### **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці у захищеному від сонячних променів місці при температурі до +25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.

### **Термін придатності**

3 роки. Термін придатності діє при дотриманні умов зберігання в оригінальній упаковці.

### **Виробник**

ТОВ «Юрія-фарм», Україна, 03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10.

Адреса виробництва: Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Кобзарська, 108.