

## **Опис**

Атравматична мазева пов'язка, виготовлена із крупносітчастої бавовняної тканини, просочена нейтральною мазевою массою (має в своєму складі білий віск та вазелін). За рахунок сітчастої структури забезпечується добра проникність для повітря та ексудату. Гідрофобна мазева основа зменшує прилипання пов'язки до рани і травматизацію грануляційної тканини при заміні пов'язки. Завдяки мазевій основі краї рані стають еластичними, стимулюється процес грануляції.

## **Рекомендації щодо застосування**

Рекомендована для стимуляції грануляцій при трофічних та діабетичних виразках, термічних та хімічних опіках, рваних та скальпованих ранах, донорських ранах, ссадинах та подряпинах. Також використовується для фіксації розщеплиних шкірних трансплантантів. Особливо підходить для пацієнтів з чутливою шкірою.

## **Спосіб застосування**

Пов'язку необхідно підбирати відповідно до розмірів рані. Необхідно, щоб пов'язка виходила за краї рані на 1,5-2 см. Зміна пов'язки відбувається за необхідністю, один раз на 1-3 дні. В якості вторинної пов'язки рекомендовано використовувати стерильні сорбуючі пов'язки або серветки з нетканого матеріалу.