

Опис

Виготовлений на водній основі, не містить барвників, не залишає плям. Не містить спирту. Забезпечує достатнє зволоження слизової оболонки піхви, посилює чуттєвість під час статевого акту. Можна застосовувати для вагінального та анального сексу. Не пошкоджує презерватив.

При виникненні неприємних відчуттів одразу припинити використання гелю-змазки. Не наносити на ушкоджену шкіру. Не використовувати при пошкодженні упаковки. Не використовувати при підвищеній чутливості до будь-якого з інгредієнтів продукту. Використовувати тільки за призначенням. При випадковому проковтуванні дитиною звернутися до лікаря. У випадку небажаних явищ зверніться до лікаря.

Спосіб застосування

Відкрити упаковку круговим рухом по перфорації в напрямку, зазначеному стрілками. Наносити гель в необхідній кількості під час статевого акту на шкіру, пеніс, навколо піхви або з зовнішнього боку надягнутого презерватива.

Натиснути на диспенсер п'ять разів, а при використанні презерватива або для анального сексу - сім разів. Повторити нанесення за потребою.

Після статевого акту бажано змити інтимну гель-змазку теплою водою з милом. Уникати контакту з очима. Не є контрацептивом. При необхідності проконсультуйтеся з лікарем.

Склад

Вода, гліцерин, пантенол, карбоксиметилцелюлоза, пропіленгліколь, метилпарабен, пропілпарабен, карбомер, натрію гідроксид, ароматизатор.

Умови зберігання

Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати у темному, сухому та недоступному для прямих сонячних променів місці при температурі 5 °С - 25°С.

Дата виготовлення, термін зберігання і номер партії вказані на дні упаковки.

Протипоказання

Алергія на один з компонентів.