

Опис

Металевий скарифікатор медичний – це одноразовий медичний інструмент, який використовується для проколювання шкіри пальця для взяття капілярної крові. Він являє собою пластинку з нержавіючої сталі з центральним гострим зубцем у вигляді списа. Металевий скарифікатор медичний є одноразовим інструментом, який використовується лише один раз. Це запобігає поширенню інфекцій.

Скарифікатор сталевий стерильний MP MedPlast – простий і ефективний інструмент, який широко використовується в медичній практиці. Він забезпечує безболісне і безпечне взяття капілярної крові для лабораторних досліджень при діагностиці захворювань крові, ендокринної системи, печінки, нирок та інших органів і для контролю перебігу хвороби в цілому.

Скарифікатори мають гострий спис, який дуже легко проникає в шкіру. Вони тверді та гладкі, мають обмежувачі з боків, які контролюють глибину проколу.

Основні особливості продукту:

- Скарифікатори сталеві мають індивідуальне пакування (паперовий пакет), стерильні та готові до застосування в будь який час
- Оптимальний розмір леза дозволяє за 1 прокол мінімально травмувати тканини (глибина проколу становить 2 мм) та отримувати достатній обсяг крові
- Скарифікатори міцні та надійні, мають гладку поверхню та обмежувачі з боків, які контролюють глибину проколу
- Скарифікатори мають гострий, відмінно заточений тригранний центральний спис для мінімальної травматизації
- Скарифікатори виготовлені з нержавіючої хромованої сталі та стерилізовані гама-опроміненням
- Термін придатності 5 років
- Упаковка містить 40 блістерів по 5 шт (разом 200 шт)

Спосіб застосування

Інструкція із застосування:

1. Перевірити цілісність індивідуальної упаковки.
2. Обрати місце проколу та розігріти його.
3. Обробити місце проколу спиртом та дати висохнути.
4. Розкрити індивідуальний пакет, дістати скарифікатор.
5. Зробити прокол.

Застереження

Важлива інформація!

1. Для взяття проби капілярної крові.
2. Тільки для одноразового використання.
3. Не використовувати при пошкодженні цілісності індивідуального пакету та по закінченню терміну придатності.
4. Зберігати в добре провітрюваних приміщеннях, при температурі не вище 40° С та відносній вологості 80%.
5. Утилізувати відповідно до вимог національних стандартів.

Виробник

ТОВ «ДОЛФІ-Україна», 49130, Україна, м. Дніпро, вул. Березинська, 24-А, Made in China. Виготовлено в Китаї.

Виробнича дільниця/Manufacturing site: Нінгбо Грітмед Медікал Інструментс Ко., Лтд., 16Ф-1, Білдінг 1, № 98 Чуангюан Род, Хай-Теч Зон, 315042 Нінгбо, Чжецзян Провінс, КНР

Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd., 16F-1, Building 1, No.98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042 Ningbo, Zhejiang Province, PEOPLE`S REPUBLIC OF CHINA