

Опис

Тест на вагітність, який володіє підвищеною чутливістю (10 мМО/мл), що дозволяє визначати факт вагітності, що настала, вже через 7-10 днів з моменту зачаття (за умови нормальної вагітності).

Ультрочутливий тест дозволяє визначити вагітність в середньому на 3-6 днів раніше інших, менш чутливих тестів.

- Для того щоб дізнатися результат, потрібно зібрати в чисту скляну або пластикову ємність сечу і опустити в неї смужку.
- Опустити на 0,5 – 1 хвилину вертикально вниз стрілками, щоб рівень сечі не перевищував лінію зазначену стрілками.
- Витягнути тест-смужку на суху поверхню і через 3 – 5 хвилин отримати результат.

Умови зберігання

Зберігайте експрес-тест при кімнатній температурі (від 2 °C до 30 °C) у нерозкритому фольгованому пакеті; стежте за терміном придатності. Не піддавайте тест дії прямого сонячного проміння, вологи або тепла.