

Опис

Шприц призначений для виконання внутрішньошкірних, підшкірних, внутрішньом'язових і внутрішньовенних ін'єкцій кваліфікованим та спеціально навченим медичним персоналом. При використанні слід дотримуватись правил виконання даних процедур та техніки асептики і антисептики.

Спосіб застосування

- Відкрити стерильну упаковку та дістати шприц із надітою голкою, дотримуючись правил асептики.
- Згідно призначень, набрати необхідну кількість розчину у шприц.
- Якщо використовується шприц з двома голками, набрати необхідний розчин в шприц, голку відкласти в лоток для використаного матеріалу, далі дотримуючись правил асептики, вийняти другу голку з пакету, приєднати її до конусу шприца, тримаючи за ковпачок. Перевірити щільність з'єднання. При використанні безпечної голки, відігнути ковпачок безпеки та встановити його під кутом не менше 90 градусів по відношенню до голки.
- Перед проведенням ін'єкції слід випустити повітря, що міститься в шприці, шляхом поступового тиску на поршень шприца.
- Обробити місце ін'єкції антисептиком.
- Виконати ін'єкцію згідно правил техніки її проведення.
- Не проводити введення, якщо шкіра у місці ін'єкції має ознаки інфекції, запалення або подразнення, або вени мають ознаки флебіту.

Увага! У разі потреби проведення внутрішньовенного введення розчину через периферичну венозну канюлю, при під'єднанні до додаткового ін'єкційного порту канюлі шприц застосовується без голки. Використання голки в даному випадку призведе до пошкодження клапана периферичної венозної канюлі.

Застереження

- Не застосовувати у разі пошкодження індивідуального пакування та/або закінчення терміну придатності.
- Тільки для одноразового використання.
- Змішування в одному шприці різних розчинів дозволяється лише під наглядом лікаря та за рецептом.
- Використані голки та шприци утилізувати відповідно до місцевих вимог по утилізації відходів.