

## **Опис**

Пластири набору призначені для застосування при дрібних пошкодженнях шкіри. Подушечка пластирів має високі абсорбуючі властивості, просочена антисептиком хлоргексидином біглюконатом 0,3 % ваг. Завдяки ранозахисній сітці подушечка забезпечує дбайливий захист та легко видаляється.

## **Спосіб застосування**

Перед застосуванням пластиру потрібно очистити та продезінфікувати рану й прилеглу ділянку шкіри, просушити. Розкрити упаковку, зняти захисну плівку, наклеїти пластир на суху та чисту шкіру. Рекомендується міняти щодня або при намоканні подушечки.

## **Протипоказання**

Індивідуальна непереносимість основи пластиру, клеючої речовини. В разі виникнення подразнення не використовувати продукт.

## **Умови зберігання**

Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C.

## **Виробник**

ТОВ «АГРОПЛАСТ» Факт. адреса: Україна, 03148, м. Київ, пр-т Леся Курбаса, 2-Б.

Замовник: ТзОВ «Представництво Баум Фарм Гмбх», 79052, Україна, м. Львів, вул. Широка, 66.