

Опис

Пластир медичний з іонами срібла універсальний помічник при всіх видах поверхневих ран. Ранозахисна мікросітка подушечки пластиру збагачена іонами срібла, які захищають пошкоджену ділянку від інфікування. Подушечка пластиру також має високі абсорбуючі властивості, забезпечує дбайливий захист та легко видаляється.

Застосування: при порізах, дрібних пошкодженнях шкіри.

Спосіб застосування

Перед застосуванням пластиру потрібно очистити та продезінфікувати рану й прилеглу ділянку шкіри, просушити. Розкрити упаковку, зняти захисний шар, наклеїти пластир на суху та чисту шкіру. Рекомендується міняти щодня або при намоканні подушечки.

Протипоказання

Не застосовувати при індивідуальній непереносимості будь якого з матеріалів пластиру. В разі виникнення подразнення не використовувати продукт.

Умови зберігання

Зберігати в сухому місці при температурі від +5 °С до +30 °С.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності.

Термін придатності

Зазначений на упаковці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності.

Виробник

ТОВ «АРГОПЛАСТ», Факт. адреса: Україна, 03148, м. Київ, пр-т Леся Курбаса, 2-Б.