

Опис

Пластири набору призначені для застосування при дрібних пошкодженнях шкіри. Подушечка пластирів має високі абсорбуючі властивості, просочена антисептиком хлоргексидином біглюконатом 0,3 % ваг. Завдяки ранозахисній сітці подушечка забезпечує дбайливий захист та легко видаляється.

Опис

Пластири набору призначені для застосування при дрібних пошкодженнях шкіри. Подушечка пластирів має високі абсорбуючі властивості, просочена антисептиком хлоргексидином біглюконатом 0,3 % ваг. Завдяки ранозахисній сітці подушечка забезпечує дбайливий захист та легко видаляється.м

Спосіб застосування

Перед застосуванням пластиру потрібно очистити та продезінфікувати рану й прилеглу ділянку шкіри, просушити. Розкрити упаковку, зняти захисну плівку, наклеїти пластир на суху та чисту шкіру. Рекомендується міняти щодня або при намоканні подушечки.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість основи пластиру, клеючої речовини. В разі виникнення подразнення не використовувати продукт.

Умови зберігання

Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C.

Виробник

ТОВ «АГРОПЛАСТ» Факт. адреса: Україна, 03148, м. Київ, пр-т Леся Курбаса, 2-Б.

Замовник: ТзОВ «Представництво Баум Фарм Гмбх», 79052, Україна, м. Львів, вул. Широка, 66.