

## **Опис**

Розроблений, щоб забезпечити довготривалу фіксацію і запобігти попаданню частинок їжі під протез.

Надійна фіксація зубного протеза додасть Вам впевненості і дозволить піклуватися про більш важливі речі. Якщо Вам необхідна надійна фіксація на цілий день і відчуття свіжості, то Крем Корега Екстра Сильний- це той продукт, який Вам потрібен.

Крем Корега Екстра Сильний забезпечує фіксацію в 3-х напрямках і не містить цинку.

## **Особливості**

- Використання продукту абсолютно безпечно, не викликає алергії і не має протипоказань і побічних ефектів.
- Крем виконаний з екологічно чистих речовин, які повністю сумісні з будь-яким типом емалі і не порушують кислотно-лужний баланс.
- Продукт не містить цинку.
- Крем допомагає зубному протезу дуже міцно і грунтовно триматися в порожнині рота, дозволяючи Вам приймати будь-яку їжу і напої, включаючи продукти, які раніше були небажані (наприклад, горіхи).

## **Спосіб застосування**

### **Нанесення**

1. Очистіть і висушіть зубний протез.
2. Нанесіть невелику кількість крему короткими смужками не дуже близько до країв зубних протезів.
3. Прополосіть рот теплою водою перед установкою зубного протезу.
4. Вставте протез в ротову порожнину, плавно притисніть і зімкніть щелепи для кращої фіксації на кілька секунд.
5. Не наносьте частіше, ніж один раз на день.

### **Видалення**

1. Прополосіть рот теплою водою.
2. Повільними погойдуючими рухами витягніть протез з порожнини рота.
3. За допомогою теплої води і зубної щітки з м'якою щетиною видаліть залишки крему з поверхні зубних протезів і з порожнини рота.

## **Склад**

Натрій-магній-цинк, сіль метилвенілефірмалеїнової кислоти, вазелін, камідь, рідкий парафін, кремній, ментил лактат, ментол, ароматизатор, барвник.