

Состав

100% стерильный изотонический раствор морской воды, что эквивалентно соли 9 г / л.

Свойства

Спрей назальный изотонический Маример® - натуральный продукт, который является стерильным физиологическим раствором морской воды с системой микродифузного впрыска. От природы обогащенный минеральными солями и морскими микроэлементами, спрей назальный изотонический Маример® рекомендуется для детей и взрослых для ежедневного очищения носовых ходов, особенно при сухости слизистой оболочки или осложненном носовом дыхании.

Микродифузная система впрыска в спрее назальном изотоническом Маример® обеспечивает мягкое промывание носовых ходов.

Рекомендации к применению

Спрей назальный изотонический Маример® рекомендуется:

- для очистки носовых ходов;
- для разблокировки заложенного носа;
- как дополнительная составляющая при заболеваниях ЛОР-органов.

Противопоказания

При индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.

Предостережение

Флакон под давлением: может лопнуть при нагревании.

Держите подальше от источников тепла, искр, открытого пламени, горячих поверхностей и любых других источников зажигания.

Курить запрещено в непосредственной близости с флаконом.

Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Защищать от солнечных лучей.

Способ применения и дозы

Дозирование: по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход, 1-4 раза в сутки, при необходимости.

Спрей назальный изотонический Маример® можно применять ежедневно в течение длительного периода.

Инструкция по применению

1. Наклоните голову в сторону.
2. Вставьте насадку в ноздрю и впрысните спрей назальный изотонический Маример® в верхний носовой ход.
3. Повторите процедуру с другим носовым ходом.
4. Поверните голову в исходное положение, чтобы дать носовым выделениям вытечь, затем удалите остатки раствора салфеткой или освободите нос от носовых выделений.

Меры безопасности при использовании.

Дозирующее устройство следует очищать мыльным водным раствором после каждого применения. Промыть и вытереть.

Срок годности

3 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

Спрей назальный, флакон с дозатором 100 мл.

Производитель

Laboratoires Gilbert, Франция.