

## **Состав**

100 г (*g*) спрея содержат 100 г стерильной изотонической морской воды (разведенной до физиологического уровня (0,9 %) водой очищенной).

Спрей назальный с морской водой «Пшик» 0,9 % для детей создан на основе морской воды из Гульмарсфьорден/Gullmarsfjorden, который представляет собой 25-километровый морской фиорд, расположенный на западном побережье Швеции, из которого водозабор осуществляется с глубины 32 м (*m*) ниже уровня моря. После заполнения алюминиевого флакона конечный продукт стерилизуется с гарантией стерильности в течение всего срока хранения.

## **Лекарственная форма**

Спрей назальный.

Прозрачный бесцветный или желтоватый раствор.

## **Фармакологические свойства**

*Свойства спрея назального с морской водой «ПШИК» 0,9% для детей:*

- улучшает функцию мерцательного эпителия, что усиливает резистентность слизистой оболочки полости носа и придаточных пазух к проникновению болезнетворных бактерий и вирусов;
- содействует очищению слизистой оболочки носа от пыли, аллергенов и инфицированного назального секрета;
- содействует разжижению слизи и нормализации ее образования бокаловидными клетками слизистой оболочки носа;
- помогает восстановить проходимость и нормальное функционирование дыхательных путей, ускоряет выздоровление во время заболеваний носоглотки и придаточных пазух носа;
- снимает заложенность носа и ощущение давления в носовых пазухах;
- помогает в нормализации pH назального секрета;
- не содержит в своем составе консервантов;
- является стерильным продуктом.

## **Показания**

- Как средство для ежедневного увлажнения слизистой оболочки носа для сохранения ее защитных физиологических свойств в условиях повышенной сухости воздуха;
- Для вывода аллергенов и гаптенов со слизистой оболочки носа,
- Для облегчения состояния пациента при острых и хронических воспалительных заболеваниях носоглотки, придаточных пазух носа и носовой полости различной этиологии (риниты, синуситы)
- В составе комплексного лечения и для профилактики ОРЗ, ОРВИ, простуды, для очистки слизистой оболочки носа от болезнетворных бактерий и вирусов и облегчения состояния пациента;
- при инфекционных заболеваниях носа и носоглотки в осенне-зимний период;
- Для очистки слизистой оболочки носа от пыли, аллергенов и других факторов загрязнения воздуха.

### **Противопоказания**

Индивидуальная чувствительность к компонентам.

### **Особенности применения**

Применение изделия более, чем одним лицом может вызвать распространение инфекции, поэтому после каждого применения следует вымыть наконечник насадки с мылом и ополоснуть горячей водой.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Спрей назальный с морской водой «Пшик» 0,9 % для детей не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Спрей назальный с морской водой «Пшик» 0,9 % для детей можно применять в период беременности и кормления грудью.

### **Способ применения и дозы**

#### Младенцы

1. Убедитесь, что насадка прикреплена. Младенца положить на левый бок. Удерживая флакон под любым углом, осторожно ввести сопло в правый носовой ход до уровня предохранительного воротничка. Для орошения быстро нажмите на распылитель, удерживая 1-2 секунды, и немного подождите, пока средство не подействует, а затем, после процедуры, голову младенца держите прямо, позволяя жидкости свободно вытекать из носа, вытирая ее гигиенической салфеткой.

Для промывания нажмите и удерживайте, пока жидкость не начнет вытекать из носа.

2. Положив младенца на правый бок, повторить процедуру с левым носовым отверстием.
3. После процедуры голову младенца держат прямо, позволяя жидкости свободно вытекать из носа, вытирая ее гигиенической салфеткой.

Процедуру повторяют 2-3 раза в день, до приема пищи.

## Дети

1. Убедитесь, что насадка прикреплена. Когда ребенок может сидеть, лежать или стоять самостоятельно, выберите наиболее удобную для него позицию.

Удерживая флакон под любым углом, осторожно ввести сопло в правый носовой ход до уровня предохранительного воротничка. Для орошения быстро нажмите на распылитель, удерживая 1-2 секунды, и немного подождите, пока средство не подействует, а затем, после процедуры, голову ребенка держите прямо, позволяя жидкости свободно вытекать из носа, вытирая ее гигиенической салфеткой.

Для промывания нажмите и удерживайте, пока жидкость не начнет вытекать из носа.

2. Повторить процедуру с левым носовым отверстием.
3. После процедуры голову ребенка держат прямо, позволяя жидкости свободно вытекать из носа, вытирая ее гигиенической салфеткой.

Процедуру повторяют 2-3 раза в день, до приема пищи.

Спрей назальный с морской водой «Пшик» 0,9 % для детей (для младенцев и детей) благодаря наличию специального предохранительного воротничка наконечника, обеспечивает простое применение без какого-либо риска.

Благодаря химическому составу и концентрации длительность и кратность применения спрея назального с морской водой «Пшик» 0,9 % для детей не ограничены, изделие является безопасным при длительном применении, не

вызывает привыкания.

Применение детям до 6 месяцев должно происходить строго по показаниям и под присмотром взрослых.

### **Срок годности**

3 года с даты изготовления. Использовать до даты, указанной на упаковке и флаконе.

### **Условия хранения**

Спрей назальный с морской водой «Пшик» 0,9 % для детей хранить при температуре от +15 °С до + 30 °С. Защищать от солнечного света.

Флакон под давлением: при нагревании может взорваться. Не прокалывать и не бросать в огонь после использования. Держать вдали от жара, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других очагов возгорания. Не курить. Не подвергать действию температуры, превышающей 50 °С.

Не распылять в глаза.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 100 мл спрея в алюминиевом флаконе в картонной упаковке.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

АО "Фармак".

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 04080, г. Киев, ул. Кирилловская, 74.