

Состав

Натриевая соль гиалуроновой кислоты, α -глицерилфосфорилхолин, витамин В12 (цианокобаламин), витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид), D-пантенол, буферный изотонический раствор рН 7,2.

Характеристика

Различные травмы механического, химического или физического характера могут повреждать целостность поверхности роговицы. Эпителий роговицы содержит много нервных окончаний, которые обеспечивают поддержание морфофункциональной целостности.

Офтассиале, капли глазные, содержит гиалуроновую кислоту, глицерилфосфорилхолин и D-пантенол, которые способствуют реэпителизации и восстановлению нервных окончаний роговицы.

Офтассиале, капли глазные, увеличивают объем слезной пленки и способствуют ее стабилизации. Комплекс витаминов (витамин В12 и витамин В6), который содержится в растворе, усиливает защитное свойство поверхности глаза, ограничивая негативное влияние внешних факторов и хирургических вмешательств.

Офтассиале, капли глазные, является медицинским изделием, предназначенным для увлажнения, защиты роговицы, а также для уменьшения дискомфорта в глазах, болевых симптомов, вызванных ощущением инородного тела, внешними факторами, хирургическими операциями и травмами, подвергающихся местному лечению.

Офтассиале, капли глазные, способствуют процессам реэпителизации роговицы и восстановлению нервных окончаний.

Технология OSD (офтальмологический дозатор нажимного типа) обеспечивает инновационную доставку абсолютно стерильных глазных капель без консервантов.

Рекомендации по использованию

Нет необходимости удалять контактные линзы перед использованием Офтассиале, капель глазных.

Перед использованием медицинского изделия следует помыть руки.

Закапывать по 1-2 капли в каждый глаз 2-3 раза в сутки или по рекомендациям врача.

Убедитесь, что капельница не контактирует с поверхностью глаза.

Особые указания

В случае возникновения побочных реакций следует прекратить применение медицинского изделия и обратиться к врачу.

Перед использованием медицинского изделия необходимо убедиться, что контейнер не поврежден.

Не используйте изделие после окончания срока годности, указанного на упаковке. Срок годности указан в отношении запечатанного продукта при условии надлежащего хранения.

Для закапывания в глаза, не глотать.

Не используйте Офтассиале, капли глазные, если у вас аллергия или в случае известной гиперчувствительности к компонентам медицинского изделия.

Условия хранения

При температуре не выше 30 °С.

Упаковка

По 10 мл в флаконе; по 1 флакону в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Д.М.Г. Италия С.р.л / D.M.G. Italia S.r.l.