

Состав

1 г средства смазывающего офтальмологического ВитА-ПОС® содержит:

Витамин-А-пальмитат - 250 МЕ

Белый вазелин, жидкий парафин, светлый жидкий парафин, ланолин.

Описание

ВитА-ПОС®

Средство смазывающее офтальмологическое

Содержит витамин А

Не содержит консервантов!

Область применения

- для улучшения состояния слезной пленки и защиты глазной поверхности;
- для устранения дискомфорта при ощущении “сухости”, чувстве инородного тела, жжении в глазах, в том числе возникающих под воздействием: *климатических факторов*, таких как, кондиционированный воздух в автомобиле, в самолете; ветер, холод, интенсивное солнечное излучение, экологически нездоровый воздух или сигаретный дым; *интенсивной зрительной нагрузки*, например, при длительной работе с компьютером, фотокамерой, при чрезмерном времяпрепровождении перед телевизором, необходимости управления автотранспортом в ночное время суток, при длительном ношении контактных линз.

Свойства

Медицинское изделие «Средство смазывающее офтальмологическое ВитА-ПОС®» - стерильное маслообразное средство, предназначенное для закладывания в конъюнктивальный мешок, содержащее витамин А (250 МЕ ретинола пальмитата в 1 г средства.)

Витамин А, входящий в состав средства ВитА-ПОС®, является естественной составной частью слезной пленки и придает средству нежную маслообразную консистенцию, которая обеспечивает его хорошее смешивание с естественной слезной жидкостью и обуславливает тем самым хорошую переносимость средства.

Средство Вита-ПОС® - особенно мягкое и нежное маслообразное средство, которое, равномерно распределяясь и длительно удерживаясь на передней поверхности глаза (роговице и конъюнктиве), способствует улучшению состояния слезной пленки и тем самым надежно защищает роговицу от пересыхания.

Применение средства Вита-ПОС® способствует быстрому исчезновению субъективных симптомов дискомфорта: жжения, "сухости", чувства инородного тела.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов, входящих в состав средства Вита-ПОС®.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Средство смазывающее офтальмологическое Вита-ПОС® не следует применять одновременно с другими офтальмологическими средствами. В случаях, если нельзя избежать совместного применения, рекомендуется соблюдать паузу не менее 30 минут между использованием другого офтальмологического средства и применением медицинского изделия Вита-ПОС®.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Так как сразу после применения средства Вита-ПОС® может возникнуть кратковременное затуманивание зрения, приводящее к замедлению психических и физических реакций, не рекомендуется применять его непосредственно перед работой с механизмами и вождением автотранспорта. В связи с этим, рекомендуется применение средства Вита-ПОС® перед ночным сном.

Способ применения и дозы

Рекомендуется закладывать полоску средства длиной 1см в конъюнктивальный мешок от 1 до 3 раз в день. Частота использования устанавливается индивидуально в зависимости от Ваших ощущений, образа жизни и согласно рекомендациям врача-офтальмолога.

Особенно эффективно использование ВитаА-ПОС® перед ночным сном.

Не существует ограничений в отношении длительности применения средства ВитаА- ПОС®. В случае, если после применения средства ВитаА-ПОС® в течение нескольких дней предъявляемые Вами жалобы или дискомфорт сохраняются, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом-офтальмологом.

Способ применения и рекомендации при ношении контактных линз

Применяя средство ВитаА-ПОС®, пожалуйста, избегайте контакта кончика тубы с глазами или кожей. Отвинтите защитный колпачок, наклоните голову немного назад, слегка отведите нижнее веко вниз и мягко надавите на тубу, выдавливая полоску средства длиной 1 см в конъюнктивальный мешок, не переламявая и не сворачивая тубу.

Медленно закройте веки. После процедуры тщательно закройте колпачок.

Средство ВитаА-ПОС® не следует применять во время ношения контактных линз!

Рекомендуется использование ВитаА-ПОС® на ночь, после снятия линз.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 0С.

После первого вскрытия тубы следует использовать ВитаА-ПОС® в течение 12 недель. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

5 г средства ВитаА-ПОС® в алюминиевой тубе, помещенной в картонную пачку.

Производитель

Урсафарм Арцнаймиттель ГмбХ (Ursapharm Arzneimittel GmbH).

Индустриштрассе 35, 66129 Саарбрюкен, Германия (Industriestrasse 35, 66129 Saarbruecken, Germany)