

Описание

Для чего нужна ушная сера?

Ушная сера защищает ухо от инфекций, пыли и инородных тел. Она контролирует количество бактерий, которые обычно присутствуют на поверхности кожи наружного слухового прохода. Кроме того, ушная сера увлажняет барабанную перепонку, предотвращая ее затвердевание и жесткость, что способствует лучшей передаче звука.

Почему ушная гигиена имеет важное значение?

При нормальных условиях ушная сера выделяется и движется в направлении наружного слухового прохода во время жевательных движений. Любое нарушение данного процесса приводит к накоплению ушной серы. Как следствие, образуется серная пробка, которая препятствует нормальному функционированию уха, что приводит к потере слуха, шуму в ушах, головокружению и т.д.

Применение мягких средств для ушной гигиены помогает поддерживать наружный слуховой проход чистым и предотвращает накопление ушной серы.

Что такое А-ЦЕРУМЕН Нео Плюс®?

А-ЦЕРУМЕН Нео Плюс® мягкое средство для ушной гигиены, содержащее поверхностно-активные вещества.

А-ЦЕРУМЕН Нео Плюс® рекомендуется для детей в возрасте от 6 месяцев и взрослых.

- При регулярном применении помогает удалить остатки ушной серы и предотвращает ее накопление.

- Растворяет серные пробки.

Как А-ЦЕРУМЕН Нео Плюс® действует?

А-ЦЕРУМЕН Нео Плюс® увлажняет и растворяет серные пробки (сухая и уплотненная ушная сера).

После удаления серной пробки, ушная сера снова секретруется естественным путем для защиты и смазывания уха.

Упаковка

Флаконы-капельницы по 2 мл (ml).

Флаконы-капельницы просты и безопасны в использовании.

Состав

Мягкие поверхностно-активные вещества (натрия ацил саркозинат и эфир сахарозы), увлажнитель, натуральные пищевые красители, вспомогательные вещества до 100%.

Не содержит консервантов. Краситель природного происхождения.

Дозировка

- Для регулярной гигиены ушей: 2 раза в неделю.

- Для удаления ушных пробок: утром и вечером в течение 3-4 дней.

Способ применения

1. Наклоните голову ухом вверх, что требует лечения.
2. Закапайте половину содержимого флакона-капельницы в ухо.
3. Массируйте основание уха и держите примерно минуту.
4. Выпрямите голову, чтобы позволить средству и накопленной ушной сере вытечь, после чего промойте наружный слуховой проход физиологическим солевым раствором или чистой водой, и вытрите остатки раствора.

Предупреждение

После открытия, одноразовый флакон-капельницу следует использовать в течение часов.

Не охлаждать.

Хранить в защищенном от света месте.

Хранить при температуре от 10 до 40°C.

Не применять после даты окончания срока годности, указанной на флаконе-капельнице.

Не использовать, если флакон-капельницу поврежден.

Меры безопасности

Не проталкивать наконечник флакона-капельницы глубоко в слуховой проход, чтобы избежать раздражения.

Не применять средство в случае, когда пациент имеет перфорированную

барабанную перепонку, страдает ушной инфекцией или применяет трубку для вентиляции среднего уха. Если отмечается болезненное ощущение в ухе, перед применением следует проконсультироваться с врачом.

Избегать контакта с глазами.

Не принимать внутрь.

ХРАНИТЬ ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ И В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Производитель

LABORATOIRES GILBERT, 928 avenue du General de Gaulle, 14200 Herouville St Clair - FRANCE / ЛАБОРАТОРИИ ЖИЛЬБЕР, 928 Авеню дю Женераль де Голь, 14200 Эрувиль Сент Клер - ФРАНЦИЯ

Наименование и местонахождение уполномоченного представителя в Украине:
ООО "Биокодекс Украина", пр. Степана Бандеры, 28-А, Литера Г, Киев, Украина, 04073

Тел./факс: +38 044 237 77 84