

Склад

В 1 пакеті-саше міститься - Сіль морська 2.97 г.

У картонній коробці 30 пакетів-саше.

Показання до використання

- Пацієнтам з гострим ринітом при ГРВІ.
- Пацієнтам з алергічним ринітом.
- Пацієнтам з гайморитом, фронтитом, етмоїдитом.
- Пацієнтам з аденоїдитом.
- Пацієнтам з підвищеною сухістю слизової оболонки носа і утворенням кірок.
- Пацієнтам, що часто хворіють.
- Після хірургічного втручання на порожнині носа (за рекомендацією лікаря).
- Як складова частина щоденної гігієни.
- Спортсменам і людям, які віддають перевагу активному відпочинку, перед початком фізичної активності.

Дія мікроелементів і солей Адріатичного моря:

- *Іони кальцію і магнію* - значно покращують роботу клітин миготливого епітелію слизової оболонки носа, нормалізують реологічні властивості слизу, підсилюють резистентність слизової оболонки порожнини носа до впровадження вірусів і бактерій.
- *Йод і хлорид натрію* - мають антисептичний ефект, а також активізують вироблення захисного слизу келихоподібними клітинами.
- *Іони цинку і селену* - стимулюють місцевий імунітет слизової носа і навколоносових пазух.

Спосіб застосування

1. Розріжте пакетик і висипте морську сіль в пристрій.
2. Заповніть пристрій кип'яченою водою температури тіла до мітки і перемішуйте до повного розчинення солі.
3. Займіть зручне положення перед раковиною. Голову нахиліть вперед і злегка поверніть убік.
4. Зробіть глибокий вдих і затримайте дихання. Прикладіть кінчик пристрою до вищерозташованої ніздрі таким чином, щоб він був щільно притиснутий до неї.
5. Нахиліть пристрій таким чином, щоб розчин почав надходити з кінчика пристрою в ніздрю. Розчин буде витікати з протилежної ніздрі.

Для видалення залишків розчину з носа висякатися, не змінюючи положення голови.

Потім висякатися в прямому положенні.

Повторіть процедуру з іншою ніздрею.

Після використання промийте пристрій прохолодною водою і добре його висушіть.

Розчин морської солі, збагаченої гіпоалергенними ефірними оліями, рекомендується використовувати щодня.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Застосування при вагітності та в період лактації можливо.

Протипоказання

- Гострий отит і загострення хронічного отиту.
- Індивідуальна непереносимість компонентів засобу для промивання.
- Алергічні реакції на компоненти засобу для промивання.
- Часті носові кровотечі.
- Доброякісні і злоякісні новоутворення порожнини носа.
- Повна непрохідність носових ходів.
- Дитячий вік до 5 років.

Термін придатності

2 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 °С в сухому місці.

Зберігати в місцях недоступних для дітей.