

Состав

В 100 мл «Квикс® эвкалипт» содержится: вода Атлантического океана, вода очищенная и масло эвкалипта (0,015 мл на 100 мл).

Концентрация соли в «Квикс® эвкалипт» соответствует примерно 2,6% NaCl.

Содержит только натуральные ингредиенты.

Не содержит консервантов.

Описание

«Квикс® эвкалипт» - содержит воду Атлантического океана, богатую полезными минералами и микроэлементами, а также масло эвкалипта.

Концентрация соли в спрее «Квикс® эвкалипт» превышает таковую в слизистой носа (гипертонический раствор соли), что создает осмотическое давление, устраняет заложенность носа.

«Квикс® эвкалипт» - это натуральное средство для уменьшения заложенности в носовых ходах и придаточных пазухах носа.

Свойства медицинского изделия

- «Квикс® эвкалипт» уменьшает заложенность носа и обеспечивает ощущение свежести.
- Благодаря повышенному содержанию соли, «Квикс® эвкалипт» выводит избыточную жидкость из слизистой оболочки носа, уменьшая ее отек, заложенность носа и околоносовых пазух.
- Разжижить слизь и снимая воспаление, «Квикс® эвкалипт» облегчает сморкание
- Освежающий эффект эвкалиптового масла оставляет ощущение свежести в носу, а также в придаточных пазухах и обеспечивает облегчение дыхания.

Показания

- Помощь заложенным носовым ходам и придаточных пазух носа при простуде и гриппе.
- Активное очищение носовых ходов.
- Сильный освежающий эффект.

Противопоказания

- Гиперчувствительность к морской воде или маслу эвкалипта.
- Возраст до 6 лет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

На сегодня взаимодействий с другими лекарственными средствами не выявлено.

Способ применения и дозы

Дети от 6 до 12 лет: 1-2 впрыскивания в каждый носовой ход 2-3 раза в сутки.

Взрослые и дети старше 12 лет: 1-3 впрыскивания в каждый носовой ход 2-3 раза в сутки.

Опыт применения в особых группах пациентов

Беременность и кормление грудью

Пожалуйста, проконсультируйтесь со своим врачом в случае применения в период беременности и кормления грудью.

Встряхнуть перед использованием

1. Снимите колпачок.
2. Подготовьте спрей к применению, несколько раз нажав на манжет наконечника к достижению мелкого аэрозольного распыления.
3. Вставьте наконечник в носовой ход и нажмите на манжету с обеих сторон наконечника.
4. Протрите наконечник чистой салфеткой и наденьте колпачок.
5. Наконечник обеспечивает дозированный поток и равномерное распределение спрея.

Пожалуйста, проконсультируйтесь со своим врачом относительно длительности применения «Квикс® эвкалипт».

Не вызывает привыкания.

Побочные реакции

Масло эвкалипта может вызвать аллергические реакции (включая одышку) у пациентов с повышенной чувствительностью к эвкалипта.

В начале использования может возникать легкое жжение.

Использовать с осторожностью

После оперативных вмешательств и травм в области носа «Квикс® эвкалипт» следует применять только после консультации с врачом.

Условия хранения

Хранить при комнатной температуре, в недоступном для детей месте.

Не используйте «Квикс® эвкалипт» после окончания срока годности, указанного на упаковке.

После вскрытия флакона «Квикс® эвкалипт» следует использовать в течение 6 месяцев.

Упаковка

Флакон спрея «Квикс® эвкалипт» содержит 30 мл раствора. В каждом флаконе содержится примерно 220 доз. Флакон оснащен системой антибактериальной защиты, который предотвращает проникновение микробов в течение всего периода использования. «Квикс® эвкалипт» является медицинским изделием.

Производитель

Фармастер

Производственная зона где Краффт.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

67150 Ерстейн, Франция