

Состав

1 мл назального раствора содержит:

натрия хлорид	8,8 мг
магния сульфат гептагидрат	2,5 мг
магния хлорид гексагидрат	1,8 мг
кальция хлорид дигидрат	0,5 мг
натрия гидрокарбонат	0,1 мг
вода очищенная	

Лекарственная форма

Спрей назальный, раствор стерильный, изотонический раствор с дозирующим устройством.

Фармакологические свойства

Полость носа является одной из важнейших в функциональном отношении структур организма. Здесь происходит преобразование (кондиционирование) воздуха перед поступлением в легкие: его механическая очистка от пылевых загрязнений, увлажнение и согревание.

В бокаловидных клетках слизистой оболочки носа образуется жидккая слизь, который увлажняет воздух, который вдыхаем. В слизи фиксируются частицы пыли, аллергены, вирусы и бактерии и др.

Слизистая оболочка полости носа имеет в своем составе мигающий эпителий с подвижными ресничками. Волнообразное движение ресничек обеспечивает направленный транспорт слизистого секрета из полости носа. Реснички мерцательного эпителия функционируют только в жидкой слизи. При повышении вязкости слизи движение ресничек мерцательного эпителия резко замедляется.

Низкая влажность, загрязненный воздух, пребывание в помещениях с центральным отоплением и кондиционерами, воспалительные заболевания слизистой оболочки носа и т.д. приводят к повышению вязкости слизи, вследствие чего страдает функция мерцательного эпителия, что приводит к накоплению слизи и создает условия для размножения в нем возбудителей различных заболеваний, которые в большом количестве всегда находятся в воздухе.

Назальный изотонический раствор минеральных солей СептоАква® способствует разжижению слизи, тем самым создавая условия для удаления излишков слизи с патогенными микроорганизмами (вирусами, бактериями и т.д.) из полости носа, помогает нормализовать функцию мерцательного эпителия, способствует размягчению и удалению частиц пыли, аллергенов, раздражителей и корок и улучшает дыхание носом.

Показания

СептоАква® содержит изотонический стерильный раствор минеральных солей, способствует снижению вязкости выделений из носовой полости, смягчению и очищению слизистой оболочки, в том числе от инородных частиц, способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа. Может применяться у взрослых, пожилых людей и детей для ежедневного использования.

Противопоказаний для применения в период беременности и кормления грудью не обнаружено.

СептоАква® спрей назальный, раствор рекомендуется:

- для людей, у которых слизистая оболочка носа подвержена чрезмерного пересыхания, особенно в жаркие или холодные периоды года;
 - для людей, проживающих или работающих в условиях повышенной концентрации пыли, повышенной температуры, пониженной влажности воздуха, в помещениях с кондиционерами или центральным отоплением;
 - как дополнительное средство для удаления густой слизи при лечении острых и хронических заболеваний носа и околоносовых пазух (в том числе аллергических)
- для ежедневной гигиены.

Противопоказания

Не используйте СептоАква®, если у Вас повышенная чувствительность к любым составляющим компонентов спрея назального.

Особенности применения

Медицинское изделие не является лечебным средством, поэтому в случаях насморка, который сопровождается кашлем, затруднением дыхания или повышением температуры тела, следует обратиться к врачу.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказаний для применения в период беременности и кормления грудью не обнаружено.

Способ применения и дозы

Способ применения

Снимите с пульверизатора защитную крышку. Перед первым применением сделайте несколько распылений в воздух к образованию мелких брызг.

Взрослые и дети в возрасте от 1 года

Вставьте кончик пульверизатора в ноздрю и нажмите на головку пульверизатора. Во время впрыска слегка вдохните через нос. Не отклоняют голову назад. Повторите процедуру для другой ноздри.

Дети в возрасте до 1 года

Перед процедурой нагрейте флакон с раствором в теплой воде до температуры тела. Положите ребенка или сядьте, если держите ребенка на руках. Поверните голову ребенка в сторону, аккуратно вставьте кончик пульверизатора в ноздрю сверху, и разместите в положении вверх. Не отклоняют голову ребенка назад, поскольку слизь из носовой полости может попасть к горлу. Нажмите на головку

пульверизатора. Повторите процедуру для другой ноздри, после чего проведите процедуру удаления излишков слизи из полости носа привычным для Вас способом. Вытрите носик ребенка чистой салфеткой.

При необходимости можете повторить процедуру несколько раз в сутки.

После каждого применения протрите кончик пульверизатора салфеткой и закройте крышкой.

С гигиенической целью и из-за риска распространения инфекции, отдельным спреем должен пользоваться только один человек.

Побочные реакции

Побочных эффектов СептоАква® не обнаружено.

Срок годности

3 года.

Не используйте СептоАква® после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте. Не замораживать! Хранить при температуре не выше 25 ° С.

Упаковка

30 мл спрея назального с дозирующим устройством в пачке из картона.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

KRKA, d.d., Ново место/KRKA, d.d., Novo mesto.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Шмарјешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения / Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.