

Состав

100 г (g) спрея содержат: 100 г стерильной изотонической морской воды (разведенной до гипертонической концентрации (0,9 %) водой очищенной), с добавлением 0,4 % CO₂, что создает шипучий солевой раствор.

Спрей назальный с морской водой «Спарклин» создан на основе морской воды из Гульмарсфьорден/Gullmarsfjorden, который представляет собой 25-километровый морской фиорд, расположенный на западном побережье Швеции, из которого водозабор осуществляется с глубины 32 м (m) ниже уровня моря. После заполнения алюминиевого флакона конечный продукт стерилизуется с гарантией стерильности в течение всего срока хранения.

Лекарственная форма

Спрей назальный.

Основные физико-химические свойства: прозрачный бесцветный раствор.

Фармакологические свойства

- разжижает и выводит из носовой полости густой секрет, корочки, кровяные сгустки;
- шипучий солевой раствор содержит маленькие пузырьки для более эффективного очищения от слизи по сравнению с обычными солевыми растворами;
- нормализует мукоцилиарный транспорт;
- очищает слизистую оболочку носа от пыли, аллергенов и раздражающих веществ;
- при простудах и аллергиях разжижает и уменьшает вязкость секрета, тем самым способствуя его выведению;
- CO₂ создает шипучий спрей, который разрушает биопленки, тормозит их рост и созревание;
- путем промывания и орошения уменьшает количество болезнетворных микроорганизмов на слизистой оболочке носа;
- не вызывает зависимости и может применяться с другими лекарственными средствами;

- помогает уменьшить применение лекарственных средств при регулярном употреблении лицами, часто болеющими ринитами и синуситами;
- помогает в нормализации pH назального секрета;
- не содержит консервантов;
- является стерильным продуктом.

Показания

- для очищения носовой полости от густого секрета, кровяных сгустков, аллергенов, раздражающих веществ, посторонних частиц, таких, как пыль, цветочная пыльца;
- для восстановления проходимости носовых путей и носового дыхания;
- в составе комплексного лечения и с целью профилактики ОРЗ, ОРВИ, простуды, для очищения слизистой оболочки носа от болезнетворных бактерий и вирусов и облегчения состояния пациента;
- для лечения острых и хронических риносинуситов;
- для облегчения местных симптомов при острых и хронических риносинуситах, при острых инфекциях верхних дыхательных путей. У лиц, часто болеющих ринитами и синуситами, регулярное применение спрея назального с морской водой «Спарклин» позволяет сократить применение лекарственных средств;
- для лечения аллергического ринита;
- для облегчения местных симптомов при аллергии;
- для увлажнения при сухости и раздражении слизистой оболочки носовой полости;
- для торможения образования и созревания биопленок;
- содействует разрушению биопленок;
- для подготовки носовой полости перед применением других лекарственных средств с целью очищения и удаления трудно отделяемого содержимого;
- для ухода за носовой полостью после оперативных вмешательств;
- для ежедневной гигиены носовой полости.

Особенности применения

Применение изделия более, чем одним лицом может вызвать распространение инфекции, поэтому после каждого применения следует вымыть наконечник насадки с мылом и ополоснуть горячей водой.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Спрей назальный с морской водой «Спарклин» не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Спрей назальный с морской водой «Спарклин» можно применять в период беременности и кормления грудью.

Способ применения и дозы

1. Снять крышку.
2. Удерживая флакон под любым углом, осторожно ввести наконечник насадки в каждую ноздрю, нажимая 1-2 секунды.

Благодаря химическому составу и концентрации длительность и кратность применения спрея назального с морской водой «Спарклин» не ограничены, изделие является безопасным при длительном применении, не вызывает привыкания.

Дети

Применяется для детей с 2-х лет.

Срок годности

3 года с даты изготовления. Использовать до даты, указанной на упаковке и флаконе.

Условия хранения

Спрей назальный с морской водой «Спарклин» хранить при температуре от +15 °С до + 30 °С. Защищать от солнечного света. Флакон под давлением: при нагревании может взорваться. Не прокалывать и не бросать в огонь после использования. Держать вдали от жара, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других очагов возгорания. Не курить. Не подвергать действию температуры, превышающей 50 °С. Не распылять в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

1 алюминиевый флакон под давлением, содержащий 125 мл (ml) спрея в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «Фармак», Украина.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

04080, г. Киев, ул. Кирилловская, 74. Произведено Аурена Лабораторис ЭйБи, Фьярвиксваген 22б ЭСИ-653 50 Карлстад, Швеция/Aurena Laboratories AB, Fjarrviksvagen 22, SE-653 50 Karlstad, Sweden для АО «Фармак», Украина.