

Состав

Устройство Аква Марис® Лейка представляет собой пластиковую емкость объемом 330 мл для приготовления раствора для промывания носа в наборе со средством для промывания Аква Марис® в виде 30 пакетов-саше с солью Адриатического моря. 1 пакет-саше содержит 2,97 г морской соли.

Фармакодинамика

Устройство оториноларингологическое Аква Марис® Лейка позволяет удобно и безопасно промывать нос по всей длине носовых ходов. Жидкость для промывания подается в полость носа «самотеком», т.е. без дополнительного давления, что позволяет избежать такого осложнения, как воспаление среднего уха (отит). Процедура проста и безопасна даже для детей, беременных и кормящих женщин. При промывании полости носа с помощью устройства Аква Марис® Лейка с поверхности слизистой носа удаляется патологическое содержимое вместе с вирусами, бактериями, аллергенами и пылью, уменьшается отек и воспаление, повышается тонус капилляров.

На слизистую оболочку оказывают благотворное воздействие полезные микроэлементы и соли Адриатического моря:

- ионы кальция и магния значительно улучшают работу клеток мерцательного эпителия, нормализуют реологические свойства слизи, усиливают устойчивость слизистой оболочки к внедрению вирусов и бактерий
- йод и хлорид натрия оказывают антисептический эффект, а также активизируют выработку защитной слизи
- ионы цинка и селена стимулируют местный иммунитет слизистой носа и околоносовых пазух.

Показания

Устройство для промывания носа Аква Марис® Лейка обеспечивает эффективное и бережное освобождение носоглотки от слизи и инородных частиц и рекомендуется к применению:

- при остром и хроническом рините;
- при ОРВИ;
- при аллергическом рините;

- при остром и хроническом гайморите, фронтите, этмоидите;
- при аденоидите;
- при повышенной сухости слизистой оболочки носа и образовании корок;
- часто болеющим пациентам;
- после хирургического вмешательства на полости носа (по рекомендации врача).

Противопоказания

Острый отит и обострение хронического отита, индивидуальная непереносимость компонентов средства для промывания, частые носовые кровотечения, доброкачественные и злокачественные новообразования в полости носа, полная непроходимость носовых ходов, детский возраст до 3-х лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Возможно применение при беременности и в период лактации.

Способ применения и дозы

1. Разрежьте пакетик и высыпьте морскую соль в устройство.
2. Заполните устройство кипяченой водой температуры тела до метки и перемешивайте до полного растворения соли.
3. Займите удобное положение перед раковиной. Голову наклоните вперед и слегка поверните в сторону.
4. Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание. Приложите кончик устройства к вышерасположенной ноздре таким образом, чтобы он был плотно прижат к ней.
5. Наклоните устройство таким образом, чтобы раствор начал поступать из кончика устройства в носовой ход. Раствор будет вытекать из противоположной ноздри.
6. Для удаления остатков раствора из носа высморкайтесь, не меняя положения головы.

7. Затем высморкайтесь в прямом положении.

8. Повторите процедуру с другой ноздрей.

9. После использования промойте устройство прохладной водой и хорошо его высушите.

Раствор морской соли рекомендуется использовать ежедневно.

Дети

Детям с 3 лет.

Побочные реакции

Не выявлены.

Срок годности

3 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения

Эксплуатация, хранение, транспортирование осуществляются при температуре окружающей среды не выше 25°C. Медицинское изделие должно храниться в сухом, недоступном для детей месте. Устройство оториноларингологическое для промывания слизистой носа индивидуальное Аква Марис® Лейка в наборе со средствами для промывания Аква Марис® не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, поэтому специальные меры для утилизации устройства не требуются.

Упаковка

Пластиковая емкость объемом 330 мл в наборе со средством для промывания Аква Марис® в виде 30 пакетов-саше.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d. (ЯДРАН - ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЈ
a.o.), Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia (Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия).