### Состав

Маннитол, глицерин, дикалия глицирризинат, сополимер PEG/PPG, EDTA динатриевая соль, N-гидроксиметилглицинат, полисорбат 20, калия сорбат, натрия гидроксид, вода очищенная, натуральные ароматизаторы.

## Рекомендации к применению

- для снятия назальной обструкции, вызванной гипертрофией носовых раковин и специфическим (аллергическим) или неспецифическим вазомоторным ринитом;
- для лечения отека, связанного с острыми и хроническими риносинуситами и аденоидитами;
- для лечения и профилактика послеоперационного рецидива носовых полипов;
- для до- и после операционного лечения патологий носа и околоносовых пазух.

# Способ применения

- 1. Снимите защитный колпачок.
- 2. Положите большой палец на основу бутылки, указательным и средним пальцем нажмите на клапаны дозатора и отпустите их.
- 3. Операцию следует повторить до появления спрея.
- 4. Слегка наклоните голову вперед и впрыскивайте спрей в ноздрю, не вдыхая его во время впрыскивания.

Взрослым и детям рекомендовано по 2 впрыскивания в каждую ноздрю 2 раза в день, или по назначению врача.

## Меры предосторожности

Продукт может вызвать временное легкое ощущение носового зуда и легкого чихания во время первого использования.

Специфический механизм действия медицинского изделия может вызвать временную переходную осмотическую риноррею после его использования.

В случае использования на дооперационном этапе следует установить отсутствие у пациента гиперчувствительности или непереносимости медицинского изделия.

Не использовать при наличии гиперчувствительности к любому компоненту медицинского изделия.

В случае появления побочных реакций использование медицинского изделия следует прекратить и обратиться к врачу.

Не допускать попадания в глаза.

Стоит плотно закрывать медицинское изделие после его использования.

Не используйте спрей после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Хранить вдали от источников тепла, а также в недоступном для детей месте.

Медицинское изделие предназначено для индивидуального использования.

Не глотать.

Не выбрасывать контейнер после его использования в окружающую среду (с целью избежать ее загрязнения).

## Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °C, а также в недоступном для детей месте.

## Упаковка

По 20 мл в флаконе; по 1 флакону в картонной упаковке.

### Категория отпуска

Без рецепта.