

## **Состав**

Раствор Рингер-лактат (точно подобранная композиция минеральных солей: натрия хлорид, калия хлорид, кальция хлорид и натрия лактат, вода).

## **Описание**

Раствор Рингер-лактат по составу максимально приближенным к физиологическим жидкостей организма, поэтому при контакте со слизистой оболочкой он бережно их увлажняет и очищает без лишнего раздражения.

Средство не содержит консервантов и пропелентов.

## **Применяют**

Сухость слизистых оболочек и заложенность носа - актуальная проблема как детей так и взрослых. Простуда, аллергия, пребывание в помещениях с сухим и кондиционированным воздухом - это все приводит к потере комфорта легкого дыхания, больше всего раздражает во время сна и приема пищи. Отсутствие правильного лечения носа может иметь серьезные последствия. Высушенные слизистые оболочки - идеальное место для развития инфекции верхних дыхательных путей.

"Назорисин Рингер Спрей" - универсальный продукт для очистки и увлажнения слизистых оболочек носа при ринити, вызванном инфекцией или аллергией. Это также отличное решение для детей, страдающих сухость слизистой носа, вызванную различными причинами.

Точно подобранные соли, содержащиеся в спрее, очищают полость носа, увлажняют и обеспечивают надлежащее среду для слизистых оболочек.

"Назорисин Рингер Спрей" не препятствует правильной работе слизистой носа и не нарушает естественный процесс очищения носа.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность (аллергия) к компонентам препарата.

## **Способ применения и дозы**

Медицинское средство следует использовать в соответствии с инструкцией по применению.

### Дозировка:

*Дети от 1 месяца:* 1-2 распыления в каждый носовой вход, 2-3 раза в день.

*Взрослые и дети от 1 года:* 1-3 распыления в каждый носовой проход 2-3 раза в день.

Спрей имеет систему, которая предотвращает введению жидкости в бутылку, таким образом медицинское изделие можно использовать в течение всего срока хранения.

Не используйте по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Не используйте при повреждении упаковки.

### Способ применения:

Снимите колпачок, несколько раз нажмите на распылитель для получения равномерной дозы. Введите аппликатор в ноздрю и нажмите на обе стороны основания аппликатора. После каждого использования очистите аппликатор и наденьте крышку.

Из соображений гигиены и избежания возможного переноса инфекции рекомендуется использовать одну бутылку для одного человека.

Чтобы сохранить характеристики продукта, не следует использовать аппликатор не по назначению.

### **Дети**

Применяют детям от 1 месяца.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 30 мл в пластиковом флаконе с аппликатором, в коробке с инструкции.

### **Производитель**

Гофарм Сп. з о.о. Сп.к.

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Улица Гурникув, 21/26, Краков 30-819, Польша.