

Состав

Устройство оториноларингологическое для промывания индивидуальный «ДОЛ», емкостью 240 мл №30, в комплекте со средствами для промывания (рецепт №1) - предназначен для профилактики и как вспомогательное средство для улучшения состояния при ЛОР-заболеваниях, с помощью промывания раствором, изготовленным с применением средства для промывания.

Ежедневное промывание безопасно.

Благодаря процедуре из полости носа удаляются вирусы, бактерии, аллергены, пыль и другие чужеродные элементы.

Входят только натуральные компоненты, обладают противовоспалительным, иммуномодулирующим, антисептическим действием.

Раствор близкий по минеральному составу к плазме крови человека, поэтому процедура промывания безопасна для слизистой носа и не вызывает неприятных ощущений.

Показания

- ринит (ОРЗ и ОРВИ);
- аллергический ринит;
- риносинусит (гайморит, фронтит, этмоидит);
- аллергический риносинусит;
- гипертрофический ринит;
- вазомоторный ринит;
- аденоиды;
- подготовка к операциям и реабилитация после операций в полости носа и околоносовых пазух.

Противопоказания

- острый отит и обострение хронического отита;
- индивидуальная непереносимость компонентов средства для промывания;
- частые носовые кровотечения;
- доброкачественные и злокачественные новообразования в полости носа;
- полная непроходимость носовых ходов;
- аденоиды III вв.

Способ применения и дозы

1. Наклонитесь вперед под прямым углом.
2. Глубоко вдохните, задержите дыхание, откройте рот на время проведения процедуры.
3. Крышку устройства плотно приложите к ноздре, что промывается.
4. Плавно, медленно с минимальным давлением сжимайте емкость.
5. При этом раствор равномерно заполняет половину носа, который промывается и вытекает наружу через другую ноздрю.
6. Если во время процедуры часть раствора попала в рот, необходимо сплюнуть раствор.
7. Когда раствор перестанет вытекать из противоположной ноздри, не разжимая емкость, отнимите устройство от носа.
8. После этого можно разжать пальцы и начать дышать.
9. Для удаления остатков раствора из носа, не меняя положения головы, высморкайтесь, держа рот приоткрытым.
10. Не меняя положения тела и головы, аналогичным способом промойте противоположную половину носа.
11. Промывайте поочередно левую и правую половины носа, пока не закончится раствор в емкости.
12. Для окончательного удаления из носовых ходов остатков раствора и слизи сожмите пустую емкость устройства, вдохните и задержите дыхание, закройте рот.
13. Плотно приложите крышку устройства к правой ноздри, закрыв левую ноздрю пальцем свободной руки.
14. Затем разожмите емкость, при этом емкость расправится.
15. Так же выполняется процедура удаления остатков раствора и слизи из левой ноздри.
16. Голову можно поднять только после завершения процедуры.
17. После применения разберите устройство.
18. Промойте детали устройства теплой водой с моющим средством, а затем проточной водой не менее трех раз, протрите и просушите.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 2 г в пакетике, по 30 пакетиков в упаковке. Устройство емкостью 240 мл многоразового использования.

Производитель

ООО "Здравник".

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

04073, Украина, Подольский р-н, г.. Киев, ул. Сырецкая, 28/2.