

## **Описание**

Тест-полоски для глюкометра One Touch Select применяются в качестве индикатора для количественного определения уровня глюкозы в свежей венозной, артериальной и капиллярной крови, взятой из кончика пальца.

## **Преимущества**

Перед тем, как приобрести прибор, потенциальные пользователи читают отзывы в интернете. Они интересуются не только об удобстве эксплуатации, а и о качестве расходных материалов, поскольку от них напрямую зависит точность измерений. Купив упаковку тест-полосок One Touch Select человеку обеспечены простота проведения анализа и качество измерений благодаря следующим особенностям:

1. Устройство кодируется автоматически после вставления полоски в гнездо аппарата.
2. Двухэлектродное строение обеспечивает точность, поскольку сопоставляются показания 2 электродов.
3. Кровь втягивается автоматически за счёт капилляра на изделии.
4. Можно брать кровь не только из пальца, а из других мест, благодаря гидрофильному адгезивному слою.
5. Прибор не включается, если стрип вставлен неправильно, что снижает риск получения некорректного результата.
6. Контрольное поле изменит окраску, в случае недостаточного объёма крови.
7. Чувствительные участки защищены от влаги, загрязнений, высоких температур, УФ излучения.

## **Способ применения и дозы**

Перед анализом, проверьте срок годности на флаконе – расходные материалы нельзя использовать позже, чем через 6 месяца после его открытия. Процедура проводится в следующей последовательности:

1. Вставьте полоску в прибор, той стороной, на которой стоит стрелка.
2. Проколите палец.
3. Поднесите палец к полоске, чтобы капилляр на конце изделия прикасался к капле.
4. Произойдёт втягивание требуемого объёма крови.
5. Дождитесь результата и вытащите расходник, после чего прибор автоматически отключится.

**Срок годности**

Срок хранения после вскрытия флакона - 6 месяцев.

**Условия хранения**

Температура хранения: 2 °С - 30 °С.

Храните тест-полоски в сухом прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Не замораживайте.

**Упаковка**

По 25 шт в тубусе, по 2 тубуса в упаковке.

**Производитель**

Лайфскан Юроп, Швейцария.