

Описание

Paramed One-X – модель из последней линейки тонометров компании Paramed с анатомической манжетой. Современный прибор с удобным USB-разъемом. 5 лет гарантии - лучшее подтверждение его качества. Модель считается самым доступным автоматом с базовым набором функций. Прибор оснащена индикатором аритмии и памятью на 60 замеров. Главная особенность: функция донакачивания воздуха до 260 мм рт.ст.

Micro-USB порт для подзарядки.

Функция накачивания манжеты до отметки в 260 мм рт. ст.

Индикатор аритмии. Если прибор наблюдает нарушение сердечного ритма, на экране появляется соответствующий значок.

Анатомическая манжета повторяет все контуры тела и плотно облегает руку, что повышает точность измерений. Подходит для плеча обхватом 22-42 см - это универсальный размер для людей разной комплекции.

Память на 60 измерений. Прибор запоминает последние результаты, фиксируя дату и время каждого. Можно использовать эти данные для самодиагностики или предоставления отчета врачу. Когда память заполнится, ее можно обнулить.

Индикатор классификации ВОЗ. На экране отображается шкала, которая показывает отклонение от нормы артериального давления.

Индикатор движения. Если человек шевелится во время процедуры, аппарат предупредит об этом. Как известно, лишние движения влияют на точность результатов.

Большой экран, на котором отчетливо видны цифры.

В комплект входят манжета, батарейки, инструкция и чехол для хранения.

Большинство тонометров накачивают воздух до отметки в 160-170 мм рт.ст., а дальше начинают спуск. Но если вы гипертоник и давление часто превышает это значение, вам нужен Paramed One-X.

Функция донакачивания - это возможность набрать дополнительный воздух в манжету, чтобы прибор правильно считывал сверхвысокие показатели.

Нажимаете кнопку - и аппарат нагнетает еще на 20 мм рт. ст. Так можно повторять вплоть до отметки в 260 мм рт. ст.

Рекомендации по использованию

В течение часа перед замером нельзя пить алкоголь и кофе, курить, заниматься спортом.

5 минут перед процедурой посидите и расслабьтесь.

Во время замера нельзя шевелиться, разговаривать, скрещивать руки и ноги.

Манжета должна быть закреплена на плече на 2 см выше локтевого сгиба. Убедитесь, что она прилегает плотно, но не давит.

Если замер проводится в положении сидя, положите руку на стол на уровне сердца.

Условия хранения

Хранить при комнатной температуре в недоступном для детей месте.

Упаковка

1 тонометр в упаковке.

В комплект входят манжета, батарейки, инструкция и чехол для хранения.

Производитель

Xiamen Ants-Bro Technology Co., Ltd., China.