

## **Описание**

Предназначен для тепловлажных ингаляций и ароматерапии парами нагретых растворов жидких лекарственных средств, в том числе настоев и отваров трав, ароматических масел.

Ингалятор тепловлажный применяют при лечении и профилактике заболеваний верхних дыхательных путей. Гипертонической болезни, бессоннице, стенокардии, ожирении.

## **Указания к применению ингалятора**

При проведении ингаляций отварами лекарственных трав, приготовленный отвар необходимо охладить до температуры 70 - 80 градусов.

При ингаляциях с использованием настоев лекарственных трав или ароматических масел, воду для ингаляции необходимо охладить до 70-80 градусов, после добавлять настои трав (4 чайные ложки - 20 мл) или ароматических масел согласно инструкции.

Время проведения ингаляций - по назначению врача, или согласно инструкции применяемого средства (обычно 10 - 15 минут). Начало ингаляции проводить очень осторожно, первые вдохи делать небольшими порциями.

## **Противопоказания**

Кровохарканье, активный туберкулез легких, дыхательная или сердечная недостаточность, рецидивирующий спонтанный пневмоторакс, наличие новообразований верхних дыхательных путей.

## **Комплектация**

- корпус;
- чашка - на 600 мл;
- крышка;
- маска;

Размеры ингалятора: высота 200 мм, диаметр 180 мм.

## **Производитель**

ПАО "Гемопласт", Украина.