

## **Описание**

Термометр медицинский стеклянный без ртути Paramed – современный, безопасный и точный термометр для тех, кто не доверяет электронным и боится использовать ртутные аналоги. Термометрическая жидкость не содержит ртуть, она содержит смесь альтернативного металла жидкостей: галлий, индий, олово, которые не токсичны, поэтому не может навредить здоровью человека или окружающей среде.

## **Показания**

Для измерения температуры тела.

## **Особенности применения**

*Главное отличие:* сбивать термометр Paramed нужно в идущем в комплекте кейсе. Для этого необходимо поместить термометр в футляр и закрутить колпачок-держатель. Короткими резкими движениями кисти руки перемещайте футляр вверх и вниз. Футляр позволяет быстро и без труда взбить внутреннюю смесь до минимального уровня.

## Преимущества

Безртутный термометр Paramed имеет ряд преимуществ:

- изделие отвечает стандартам качества, имеет государственную сертификацию;
- прост в использовании;
- изготовлен из абсолютно безопасных материалов;
- стабильная медицинская точность измерений;
- большой размер шкалы (значение 37 ° C – красного цвета);
- длительный срок эксплуатации и экономичность;
- максимально простая конструкция;
- футляр в комплекте для удобства использования.

## Очистка и дезинфекция

Промойте термометр, протрите его сухой тряпкой и продезинфицируйте наконечник этанолом (этиловым спиртом) или специальным раствором дезинфицирующего средства. В качестве альтернативы можно мыть мылом и холодной водой.

## *Характеристики*

- погрешность измерения: (максимально допустимая) 0,1°C;
- измерение в широком диапазоне: 35°C - 42°C;
- материал: стекло;
- наполнение: галлий, индий, олово;
- тип: термометр безртутный;
- подходит для ректального применения.

## **Способ применения и дозы**

Измерение температуры:

1. Извлеките термометр из защитного футляра.
2. Убедитесь, что колонка жидкости термометра чуть ниже 35оС.
3. Поместите термометр резервуаром в паховую впадину.
4. Прижмите предплечьем.
5. Зафиксировав его.
6. Держите 5-7 мин (мин) перед оценкой шкалы.
7. Футляр в комплекте для удобства хранения.

## **Условия хранения**

Беречь от детей.

## **Упаковка**

Картонная коробка.

## **Производитель**

Донг-И-Джиао I-Хуа Медикал Эквипмент Ко Лтд, Китай/Донг I I Хау Медикал Текнолоджи Ко., Лтд