

Описание

Этот большой набор массажных вакуумных банок позволяет делать самостоятельно массаж: спины, бедер, ягодиц, рук, ног, шеи и лица. Банки легко моются и не нуждаются в особых условиях хранения. К набору прилагается прекрасная инструкция с описанием массажных линий, подробные схемы массажа как косметического, так и лечебного.

Массаж – проверенный метод для улучшения самочувствия, качества кожи. Вакуумный массаж – действенное средство против целлюлита – способен устранить даже серьезный целлюлит 3-4 стадии.

Показания

Помогают при: остеохондрозе, радикулите, люмбаго, мигрени, мышечных болях, невритах, плекситах, нейромиозитах, последствиях травматических поражений периферических нервов, бронхиальной астме и хронических бронхитах, повреждениях, их последствиях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата, эффективно разглаживают кожу, борются с ожирением и целлюлитом.

Способ применения

1. Перед началом процедуры промойте массажную банку мыльной водой или обработайте антисептиком.
2. Обильно нанесите массажное масло.
3. Сожмите баночку у основания, установите на массируемую область и делайте массаж по линиям в инструкции.
4. Не держите банку в одном месте.

Противопоказания

Любые раздражения на коже, кожные заболевания, раны, порезы, глубокие ссадины. Не рекомендуют баночный массаж в дни менструаций, во время беременности и в первые пару месяцев после родов.

Условия хранения

Хранить при комнатной температуре.

Упаковка

Банки вакуумные в упаковке.

Производитель

Селком Лтд, Украина.