

Состав

Пленка РПУ предназначена для получения рентгеновских снимков с использованием усиливающих экранов как синего, так и зеленого свечения при одинаковой экспозиции для обоих случаев.

Пленка РП-У производится из материалов предоставленных концерном AGFA, что обеспечивает высокое качество как самой пленки, так и получаемых изображений.

Широкая область применения.

Высокое разрешение рентгеновской пленки РП-У позволяет четко установить патологию заболеваний и исключить повторные обследования, этому способствует высокая избирательность и максимальное количество градаций серого цвета (256 оттенков). Высокая фотографическая широта определяет стабильную воспроизводимость снимков и устойчивость к изменениям режимов обработки.

Пленка хорошо обрабатывается как в ручном, так и автоматическом режиме.

Размер листа: 13 см x 18 см.

Рекомендации по освещению темной комнаты

Рекомендуется использовать специальный красный светозащитный фильтр. Его следует использовать вместе с 15-ваттной матовой лампой и размещать на расстоянии не менее 1,2 м от загрузочно-разгрузочного оборудования проявленной машины, а при ручной обработке – от верхней плоскости рабочего стола или оборудования для фотохимической обработки.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Упакованную неэкспонированную пленку хранить вертикально при температуре 10-23 °С в сухом месте, при влажности 30-50%. Пленку необходимо оберегать от источников ионизирующей радиации.

Упаковка

По 1 листу в картонной упаковке.

Производитель

ЧП "Фирма Онико", Украина.