

Назначение

Спринцовки используются для медицинских целей в лечебных учреждениях, а также для индивидуального использования в домашних условиях. Спринцовка типа Б являет собой баллон, в горловину которого вставлен наконечник.

Способ применения и дозы

Перед первым использованием баллон спринцовки тщательно вымыть горячей водой и продезинфицировать в течение 30 минут кипячением, после чего промыть кипяченой водой. Наконечник полиэтиленовый необходимо простерилизовать погружением в 6% раствор перекиси водорода на 6 часов. После стерилизации наконечник нужно промыть кипяченой водой. В дальнейшем спринцовку перед использованием промыть горячей водой и ополоснуть кипяченой водой. Перед использованием наконечник необходимо смазать нейтральным жиром.

Баллон спринцовки сжать рукой, опустить наконечник в медицинский раствор и, ослабив давление на баллон, наполнить его раствором. Затем ввести наконечник спринцовки в полость организма и сжимая наполненный баллон, ввести жидкость. После использования спринцовки нужно промыть горячей водой.

Спринцовка должна контактировать с лечебными растворами не более 30 минут. Содержит фталаты. Спринцовку для растительных масел не применять.

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить при комнатной температуре.

Упаковка

Спринцовка в картонной упаковке.

Производитель

ООО "Поликом", Украина.