

Описание

CITO TEST H.Pylori Ag - простой, быстрый иммунохроматографический тест для качественного определения антигенов H. Pylori в образцах фекалий.

Хеликобактер (*Helicobacter pylori*) - патогенная бактерия, которая является виновником развития наиболее распространенных заболеваний желудочно-кишечного тракта - гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

Доказано, что 80% случаев язвы желудка и примерно 95% случаев язвы двенадцатиперстной кишки, основным фактором развития была инфекция H. Pylori.

Его своевременное определение очень важно для нашего благополучия - ведь чем раньше начать лечить хеликобактерную инфекцию, тем больше шансов предотвратить развитие серьезного заболевания. Именно по этой причине тест на хеликобактер - надежный и простой инструмент для выявления этого опасного возбудителя - никогда не теряет своей актуальности.

Способ применения и дозы

Снимите с пробирки для образца крышечку и используйте палочку, возьмите достаточное количество образца (примерно 125 мг) из четырех различных участков. Если образец фекалий жидкий, с помощью пипетки возьмите 125 мкл образца. Добавьте образец в пробирку.

Закройте пробирку с растворителем по образцу. Встряхните пробирку для того, чтобы получить однородную суспензию.

Отрицательный результат: только одна контрольная линия зеленого цвета появится на белой центральной участке теста.

Положительный результат: в дополнение к зеленой контрольной линии также появится четкая красная тестовая линия на белой центральной участке теста.

Недействителен результат: отсутствие зеленой контрольной линии независимо от появления или отсутствия красной тестовой линии.

Недостаточное количество образца, неправильная техника выполнения тестирования или порчи реагентов является вероятными причинами отсутствия контрольной линии. Смотрите технику исполнения и повторите процедуру тестирования с новым тестом.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить тест упакованным в блистер при температуре до 30 °С. Тест сохраняет стабильность к моменту окончания срока годности, указанного на каждом блистере. Тест должен находиться в закрытом пакете до момента использования. Не замораживать.

Упаковка

В упаковке: тест, пробирка для фекалий с растворителем, инструкция.

Производитель

ООО "Фармаско", Украина.