

Описание

Только для *in vitro* диагностики. Оценка результатов тестирования проводится визуально путем сравнения реакгентной полоски со шкалой цветов, которая нанесена на контейнер или при помощи анализатора. При визуальном проведении оценки результатов необходимо придерживаться всех указаний, содержащихся в инструкции.

Показатели зависят от нескольких факторов:

- изменчивости цветового восприятия;
- наличия или отсутствия препятствующих и обычно присутствующих основных составляющих мочи;
- лабораторных условий, в которых проводится исследование (например, освещение, температура и влажность).

Показания

Реагентные полоски предназначены для экспресс-анализа мочи с целью выявления глюкозы, кетонов (ацетоуксусной кислоты).

Меры предосторожности

Предостережение

- Только для профессиональной *in vitro* диагностики
- Не вынимать осушитель из контейнера с полосками
- Открывать контейнер и доставать полоски нужно непосредственно перед тестированием
- Не использовать тест в случае повреждения целостности контейнера
- Хранить в недоступном для детей месте
- Тест-полоски предназначены только для исследования мочи и не должны использоваться для анализа других биологических жидкостей организма
- Место работы должно быть чистым и без следов моющих или других химикатов

Способ применения и дозы

Для получения правильных результатов следует соблюдать процедуру тестирования:

- Достаньте полоску из контейнера и сразу закройте его крышкой. Осмотрите полоску. Тест-полоска непригодна для использования, если тестовая зона обесцвечена или потемнела.
- Погрузите тестовую зону полоски в мочу не более чем на 2 секунды.
- Проведите ребром полоски по краю емкости для того, чтобы удалить остатки мочи, при этом тестовая зона не должна касаться края емкости.
- Держа полоску в горизонтальном положении, промокните ее адсорбирующим материалом для окончательного удаления остатков мочи. Избыток мочи может привести к взаимодействию реактивов соседних зон на тестовой зоне и, как результат, к появлению неверных результатов тестирования.
- Интерпретацию результатов тестирования проведите через 60 секунд при интенсивном освещении путем сравнения результатов тестирования со шкалой цветов на контейнере. При учете результатов полоску следует держать в горизонтальном положении для того, чтобы избежать взаимодействия реактивов соседних участков в тестовой зоне в случае избытка мочи.

Условия хранения

После извлечения необходимого количества полосок, контейнер необходимо сразу закрыть, плотно закрутив крышку

Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 2 до 30°C, плотно закрытым, не замораживать

Избегать влаги и прямых солнечных лучей.

Не использовать после истечения срока годности.

Упаковка

50 штук в картонной коробке.

Производитель

DFI Co Ltd, Корея