

Описание

Ланцеты Accu-Chek Softclix обеспечивают практически безболезненное, гигиеничное и безопасное получение капли крови.

- дизайн в виде ручки;
- исключение риска повреждения кожи;
- практически безболезненное получение капли крови;
- диаметр иглы: 0,4 мм;

Описание

Ланцеты – необходимая составляющая медицинского устройства для прокалывания кожи. Они применяются при проведении анализов, в том числе при исследовании уровня глюкозы в крови у больных, страдающих сахарным диабетом.

Современные разработки немецкой компании Акку-Чек позволили сделать данный процесс быстрым и практически безболезненным. При этом полностью гарантируется стерильность проведения прокола.

Ланцет для ручки-прокалывателя Акку-Чек – это тончайшая игла в пластиковом корпусе.

Ланцеты используются один раз, к самой игле пациент не прикасается. Так достигается необходимая стерильность при прокалывании кожи.

Способ применения

Пользоваться устройством Акку-Чек Софткликс очень легко благодаря его небольшому размеру и удобному дизайну:

1. Снимите колпачок.
2. Вставьте новый ланцет в специально предназначенный для этого держатель и нажмите до щелчка.
3. Закройте устройство колпачком – тоже до щелчка.
4. Убедитесь в том, что круговой регулятор глубины прокола установлен на нужном вам уровне.
5. Нажмите кнопку взвода до щелчка.
6. Аккуратно прижмите устройство к кончику пальца и нажмите на кнопку спуска.

7. После проведения измерения уровня глюкозы снимите колпачок с устройства и удалите ланцет.

Более подробную информацию о работе устройства можно найти в руководстве пользователя.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке производителя, в сухом месте.

Упаковка

По 25 шт в упаковке.

Производитель

Roche Diabetes Care GmbH, Германия.