

Состав

Одна глобула 10 мг (mg) гиалуроновой кислоты в виде ее натриевой соли, 5 мг (mg) молочной кислоты и нейтральный жир в качестве вспомогательного вещества.

Описание

Глобулы Гиалотим - это медицинское изделие, разработанное для женщин для местного применения во влагалище. Глобулы упакованы в слоты с пластиковой пленки. Слоты отделяются друг от друга с помощью перфорации так, чтобы отделить один слот с глобулы с блистера. После введения глобулы во влагалище, глобула размягчается и образует увлажняющий и защитный гель.

Свойства

После введения глобула размягчается и растворяется в выделениях влагалища. Высвобождена гиалуроновая кислота, смешанная с влагой, увеличивается в объеме и образует слой геля на поверхности слизистой оболочки влагалища. Он создает защитный барьер и как результат благоприятные условия для активации механизмов естественной регенерации и защиты. Защитная пленка, образованная гиалуроновой кислотой, возвращает естественную влагу, уменьшает воспаление и ускоряет процессы заживления поврежденной слизистой оболочки. Молочная кислота снижает кислотность в среде влагалища. Для здоровой слизистой оболочки нормальной является низкая кислотность pH (3,8-4,2), что является неблагоприятным для развития патогенной микрофлоры и помогает поддерживать естественный баланс микрофлоры влагалища.

Показания

Гиалотим предназначен для местного применения во влагалище. Он применяется для увлажнения слизистой оболочки влагалища в условиях, сопровождающихся сухостью слизистой оболочки влагалища. Особенно предназначен для:

- поддержания нормального состояния слизистой оболочки при сухости влагалища по возрасту, вследствие дефицита эстрогенов у женщин в климактерическом периоде, а также гормональной терапии и использовании контрацептивов;
- уменьшение и предотвращение осложнений, возникающих в вульве и влагалище, сопровождающихся сухостью слизистой оболочки, зудом,

покраснением, воспалением или выделениями;

- помощи при лечении слизистой оболочки, поврежденной в результате родов, гинекологических или хирургических процедур, а также атрофии слизистой оболочки в результате химиотерапии или радиотерапии;
- снижение дискомфорта при болевых ощущениях во время полового акта;
- поддержания нормального уровня кислотности во влагалище.

Особенности применения

Не используйте глобулы во время менструации.

Не превышайте рекомендуемое время лечения.

Прекратите применение продукта и обратитесь к врачу в случае значительных изменений, экземы, припухлости и других, ранее не существовавших, проблем в области наружных половых органов.

Проконсультируйтесь с врачом, если через 14 дней подряд после использования продукта симптомы не уменьшились. Если после приема препарата сначала произошло облегчения симптомов, но позже нарушение появились вновь, не начинайте новый курс лечения продуктом, сначала проконсультируйтесь с врачом.

Не используйте вместе с другими продуктами вагинального применения. В результате использования этого продукта на белье могут появиться пятна, которые трудно удаляются, что в свою очередь вызвано составом этого продукта, поэтому рекомендуется пользоваться прокладками в течение курса лечения.

Возможно взаимодействие между компонентами продукта и латексными презервативами. Поэтому не используйте латексные презервативы во время лечения глобулами. Не принимайте медицинское изделие после завершения срока годности. Не используйте, если повреждена внутренняя упаковка.

Способ применения и дозы

Глобулы назначено только для вагинального применения. Перед введением вагинальных глобул тщательно вымойте руки. Если глобула слишком мягкая, положите ее на несколько минут в холодильник перед тем, как вынимать из блистера. Отделите один слот с глобулы от блистера. Захватывайте каждый слой фольги (большим и указательным пальцами) и медленно отделяйте их друг от друга. Аккуратно выньте глобулу из гнезда. Осторожно введите глобулу пальцем глубоко во влагалище. Лучше вводить глобулу лежа, с несколько приподнятыми бедрами. Если врач не назначит вам другое, вводите одну глобулу перед сном. Глобулы надо применять непрерывно в течение 14-20 дней. В качестве

единственной терапии не используйте изделие дольше 20 дней. Прием глобул надо планировать так, чтобы он не прерывался из-за менструации.

Условия хранения

Хранить при комнатной температуре (15-25 °С) в сухом месте. Беречь продукт от действия солнечных лучей и других источников тепла. Медицинское изделие надо хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

В упаковке содержатся 10 глобул (2 блистера по 5 глобул). Вес одной глобулы - 1,6 г (g)

Производитель

Biofaktor Sp.z.o.o./ООО «Биофактор»

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

96-100, Польша, город Скерневице, ул. Чистая 4.